

中国医用内镜产业基地 骨干企业

2024年第一版

®

桐庐洲济医疗器械有限公司

TONGLU ZHOUI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

国家高新技术企业
通过ISO13485认证
杭州名牌产品
省专精特新企业



桐庐洲济医疗器械有限公司
TONGLU ZHOUI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

厂址: 浙江省桐庐县凤川街道环镇西路1号 邮编 (P.C.): 311508
ADD: No.1, Huanzhenxi Road, Fengchuan Street, Tonglu County,
Zhejiang Province, China

电话 (TEL): 0571-64261988 传真 (FAX): 0571-64263000
联系人: 周先生 Contact: Mr.Zhou
邮箱: 1979922222@qq.com / 1795567777@qq.com



洲济公司致全力打造微创器械精品

全国服务热线: 0571-6426 1988



洲济公司致全力打造微创器械精品

企业简介

桐庐洲济医疗器械有限公司是集开发、研制、生产和销售腹腔镜配套手术器械的国家高新技术企业，本公司具有强大的技术力量，先进的生产设备，依托科技、勇于创新。生产内窥镜配套手术器械采用国外先进的技术和一流的生产工艺。公司以国际知名品牌为目标，不断追求各项性能的完善，努力铸造洲济品牌。公司生产的产品有腹腔镜配套手术器械，电凝器件，电动子宫切除器及配套手术器械，医用内窥镜氙灯冷光源，内窥镜数字图像处理系统，医用加压器，气腹机，一次性结扎夹，广泛用于普外科、泌尿外科、妇产科等领域。品种多样、规格齐全，深受用户好评。

“顾客至上，满意服务”是我公司的经营发展宗旨。公司将不定期的在全国范围内，参加各种专科会议和器械展览会，极大的方便了与全国的客户互相交流与沟通，及时了解我公司及同行业的发展动态；客户将不定期的收到我公司最新产品的宣传资料；公司根据客户的特殊需要，设计、加工、定制、代购产品。

百年盛世，机遇与挑战并存。桐庐洲济医疗器械有限公司将一如既往地为广大用户提供优质的产品，良好的服务。伴随着世界贸易全球化的飞速发展，公司将抢抓机遇，迎接挑战，在高新技术领域里创造出一个新的辉煌！

售后服务:

公司以人为本，发展技术，提高技术水平，人性化设计，提高产品质量的同时，我公司不断的改进，提高和不断完善售后服务体系。提供对医院售前、售中、售后服务，使医院购置设备无后顾之忧。依据医院具体实际，设计配置兼顾当前及长远的需求。

质量保证承诺:

所有产品均送货上门，免费安装和调试；

产品保修壹年，终身维修；

产品售出时，填写《客户购买记录表》和《客户档案》，建立全程质量跟踪记录；

公司将不定期的访问客户，听取客户对使用产品的质量评价和改进建议等方面的情况；

公司设立专门的售后服务部，及时的解决和答复客户的各种投诉和咨询了解；

Introduction

Tonglu Zhouji Medical Instrument Co.,Ltd founded in the year 2005, is set development, research, production and marketing of endoscopic surgical instruments supporting the high-tec enterprises. Company has a great range of medical instruments used for laparoscopy, hysteroscopy, and other gynaecology, urethroscopy, cystoscopy, hysterectomy, sinuscopy, urology, orthopedics, Obstetrics, ENT, anorectal Branch , and other fields. All the instruments are of high quality and reasonable prices.

Meanwhile, our company has a professional sales team, who sell our products well throughout every province and every big city in China and have won good reputation among all the customers.

Since 2012, we developed a new product: HD CAMERA, which has been highly thought of since it was promoted to the market of China. We also aim at putting it into international market and are seeking international sales cooperation partners. OEM is also our selection according to customer's request.

We own the technology of Electrics, program and optics. With which we can do all according to our customer's request.

And we are willing to have cooperation with foreign companies to promote their products in China by means of our rich sales teams with Chinese medical permit and experience.



科技兴业 质量第一 用户至上 诚信服务



目录 Contrnts

电凝器件 Ballpoint-electrode Intruments	
双极电凝钳 Double-electrode forceps	02
单极高频电缆线 Single eletrode cable	03
电钩、电棒、电铲、电针、电刀 Electric hook, Electric ballpoint, Electric spud, Electric needle, Electric knife	03
带吸电凝 Ballpoint-electrode with Suction	03
单极滚轮环、单极齿状环、单极铲状环 Electric Cutting Loop	04
胸腹腔镜手术器械 Laparoscope Instrument	
冲洗吸引器 Suction & Irrigation Tobe	05
转换器 Reducer	05
塑料夹钳，施夹钳，钛夹钳，生物夹钳 Clip Applicator	06
哈巴狗抓钳 Artery/Vein Clip, Clip Applier	10
弹簧抓钳 Spring grasping forceps	10
胆道造影钳 Bile duct forceps	10
金手指拉钩 Forceps	10
穿刺器、密封帽 Trocar, Sealedcap	11
持针钳 Needle-hoding forceps Φ5x330mm	12
疝气针、穿刺缝合针 Bile duct needle, Protctive obturator blunt	13
胆总管切开刀 Cholangiotome Φ5/Φ10x330mm	13
胆管针 Bile duct needle	13
气腹针 Veress needle	13
打结钳 Knot forceps Φ5x330mm	14
三叶钳、五叶钳 Fan-shaped forceps Φ5/10x330mm	14
推结器 Knot pushe Φ4/5x330mm	14
撑开器 Spreader	14
荷包抓钳 Clamp purse	14
各种钳头、手柄 Forceps,Scissors and Handles	16
ZJ-WF型单孔组合式腹腔镜手术器械 Single-hole combined laparoscopic surgical instrument	24
甲状腺手术器械 Thyroid operathing instrument	24
双关节胸腔手术器械 Thoracotomy Instruments	26
妇科手术器械 Gynaecology	
电动子宫切除器及配套手术器械 Electric hystera-cutter	27
阴道切除手术器械 Vaginal instruments	28
专用阴道拉钩 Special vaginal retractor	28
专用阴道缝合拉钩 Special vaginal retractor	28
多功能举宫操纵器 Multifunctional uterus-liftuing work apparatus	29
多功能举宫器 Multifunctional uterus-liftuing work apparatus	30
附属设备 Accessories	
内窥镜仿真训练器 Endoscopy simulation training	31
腹腔镜主机系统 Laparoscopic host system	32
高清摄像机 Camera system	33
高亮度冷光源 Cold light source	34
气腹机 Insufflator	35
医用加压器 Suction Irrigation device	36
医用器械消毒盒 Medical instruments sterilizing boxc	39
一次性结扎夹 Disposable ligation clip	40

双极电凝钳 Double-electrode forceps Φ5×330mm

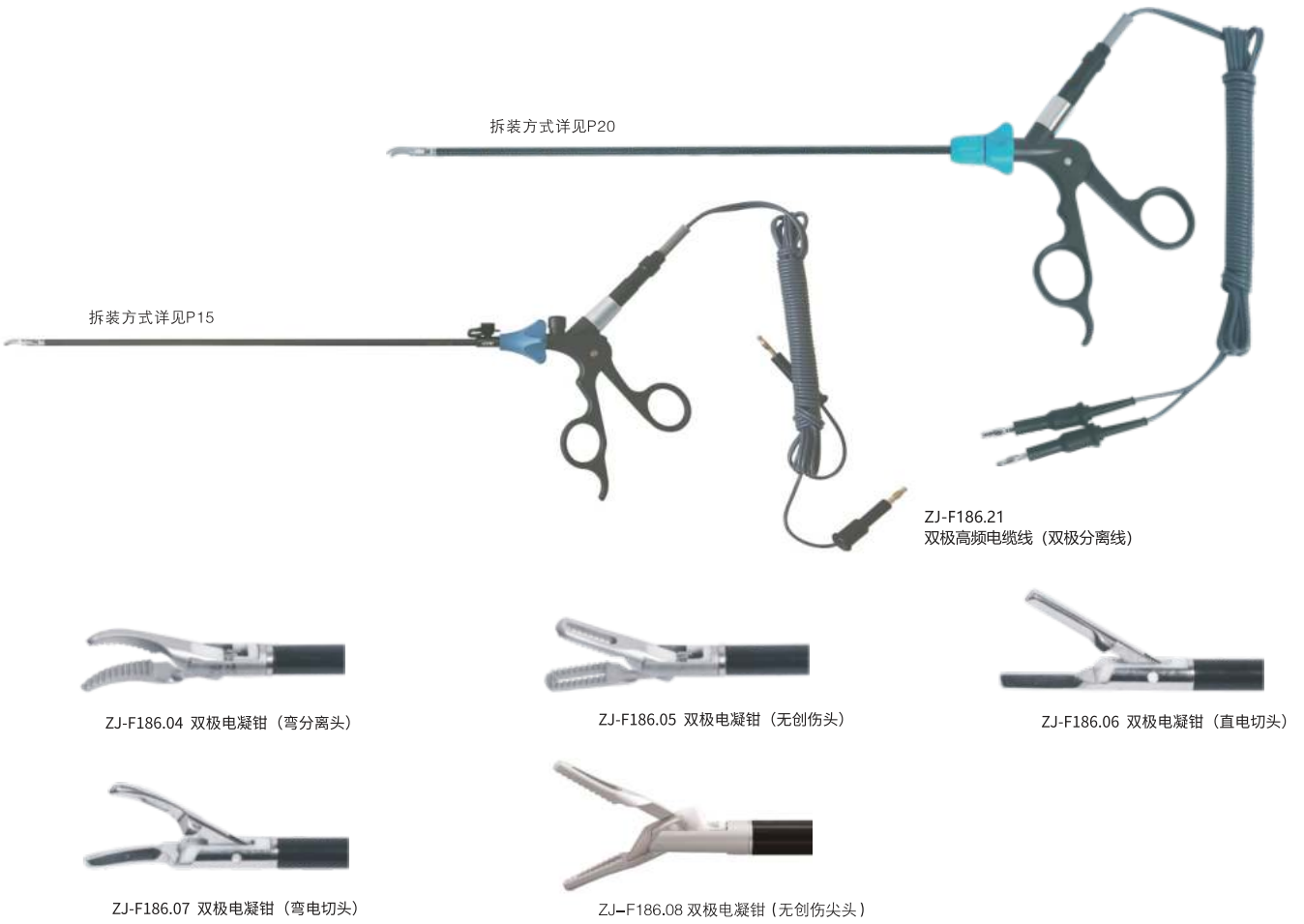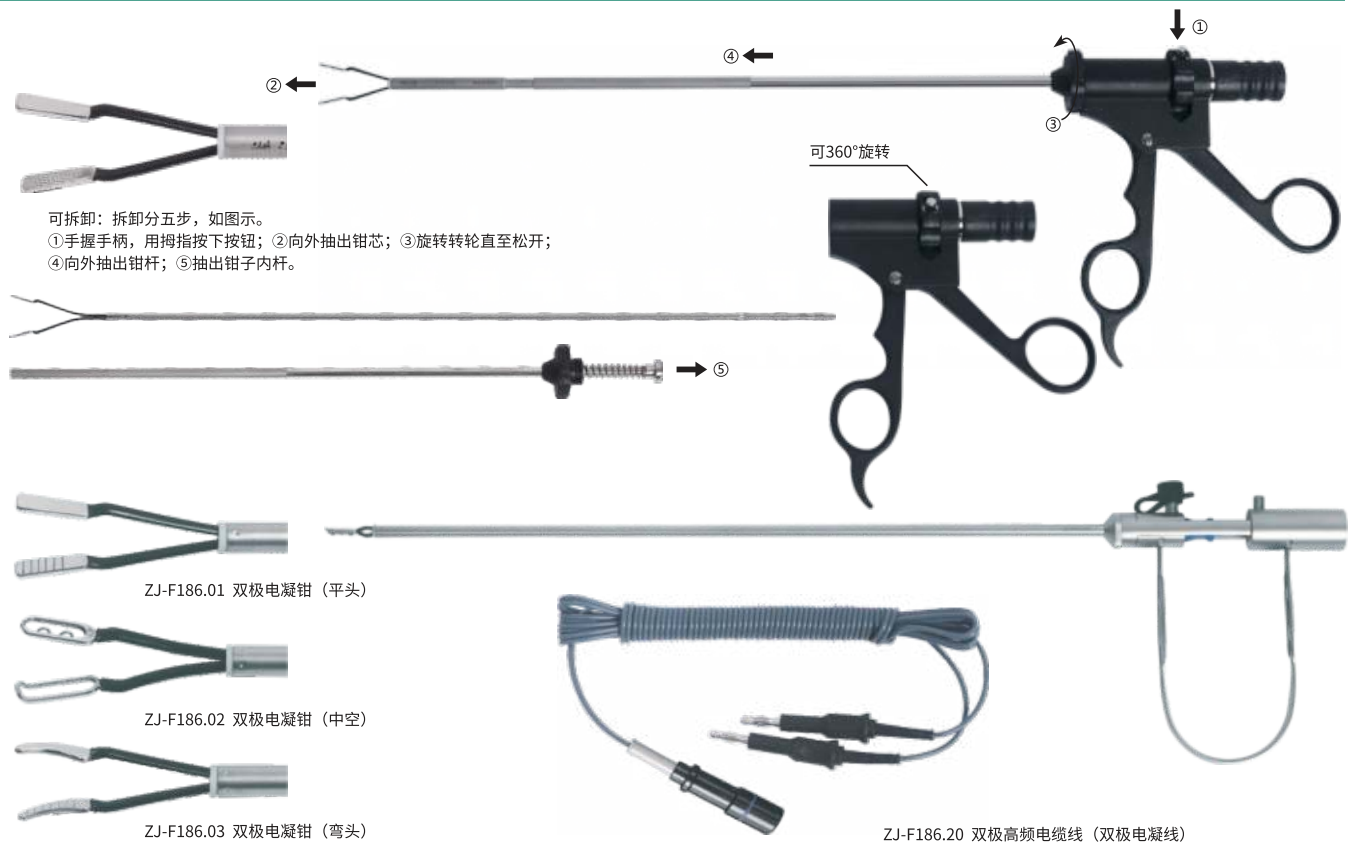

单极高频电缆线 Single eletrode cable



ZJ-F314 单极高频电缆线



ZJ-F314.3 转换接头



ZJ-F314.4 转换接头

电钩、电棒、电铲、电针、电刀 Electric hook, Electric ballpoint, Electric spud, Electric needle, Electric knifeΦ5×330mm



ZJ-F172 单极电凝棒



ZJ-F175 单极电凝铲



ZJ-F172.1 单极电凝棒 (球形)



ZJ-F174 单极电凝针



ZJ-F170 单极电凝钩




ZJ-F170.1 单极电凝钩 (问号型)



ZJ-F176 电刀


带吸电凝 Ballpoint-electrode with Suction Φ5×330mm

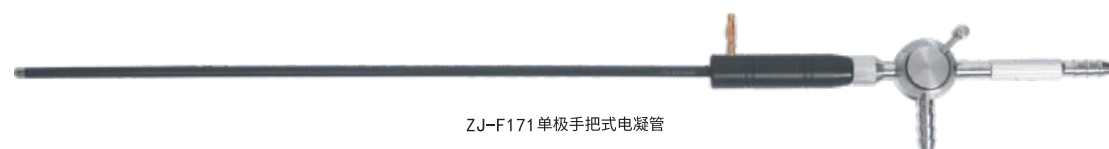

ZJ-F171 单极手把式电凝管



ZJ-F169 单极柱塞电凝管

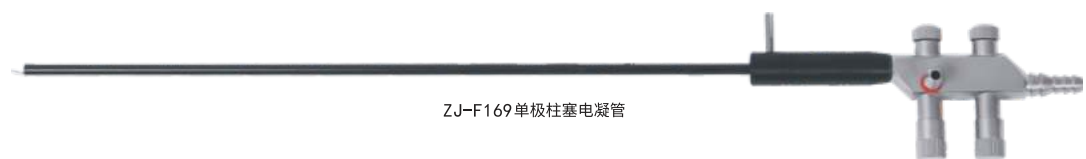

单极滚轮环、单极齿状环、单极铲状环 Electric Cutting Loop




ZJ-D108 单极齿状环



ZJ-D109 单极滚轮环




ZJ-D110 单极铲状环

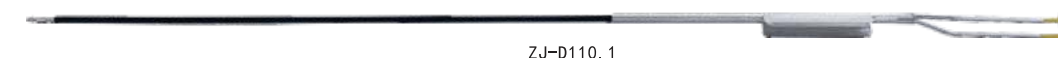

ZJ-D110.1



ZJ-D110.2

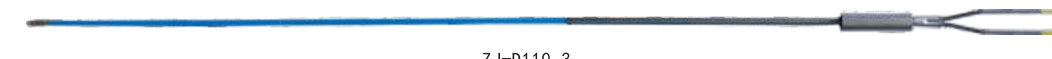


ZJ-D110.3




ZJ-D110.4



ZJ-D110.5

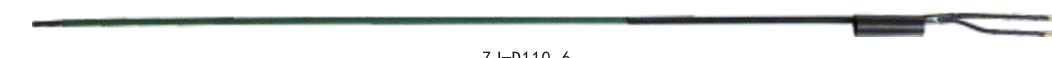


ZJ-D110.6

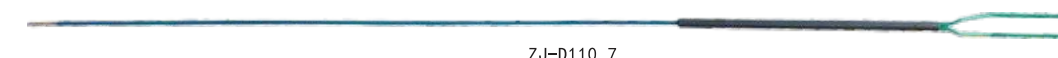


ZJ-D110.7



ZJ-D110.8

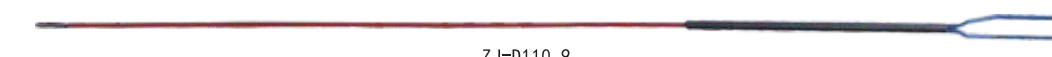

ZJ-D110.9

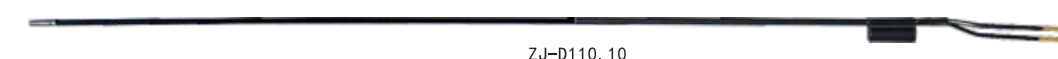


ZJ-D110.10




ZJ-D110.11


冲洗吸引器 Suction & Irrigation Tobe

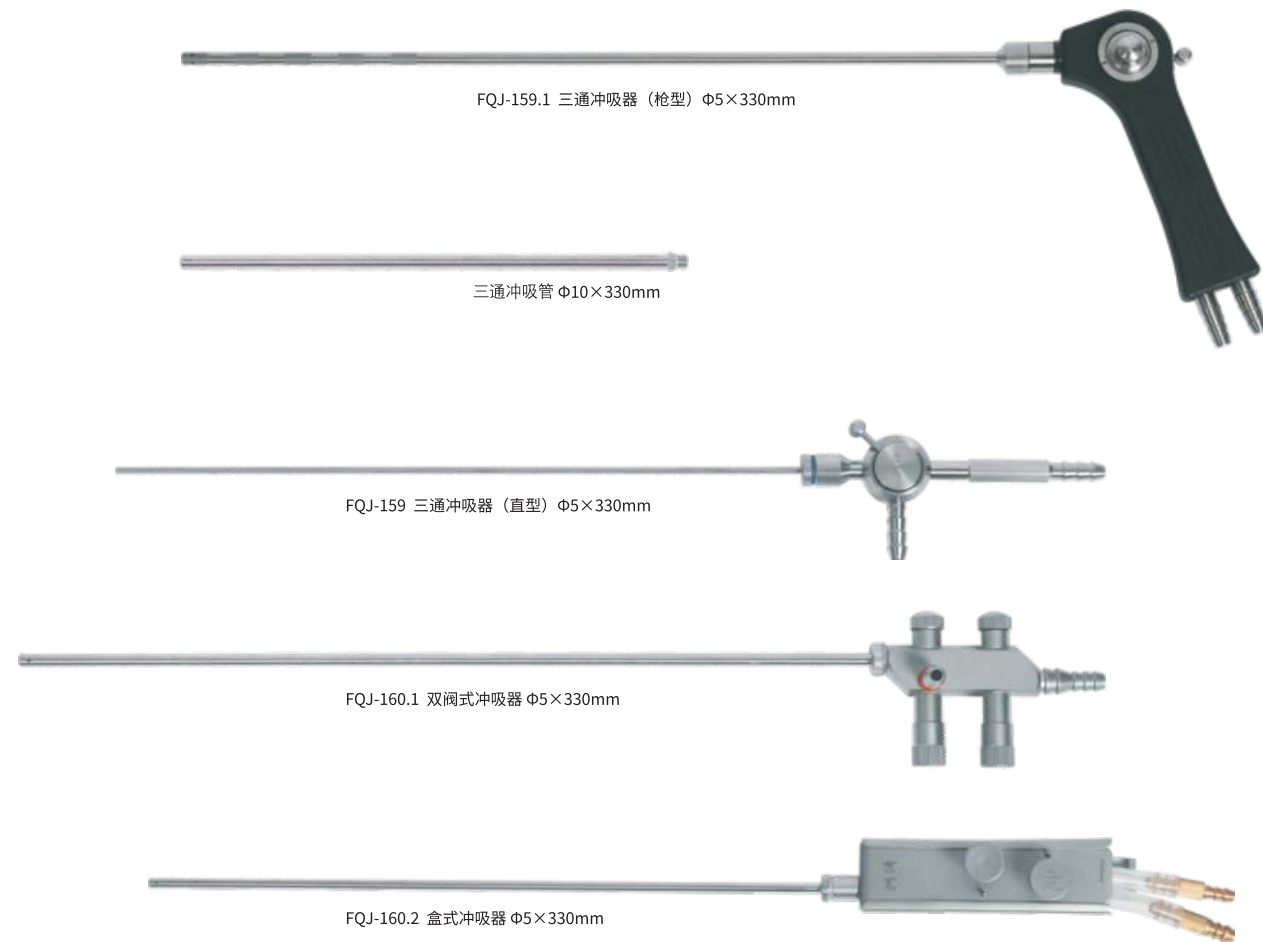


转换器 Reducer

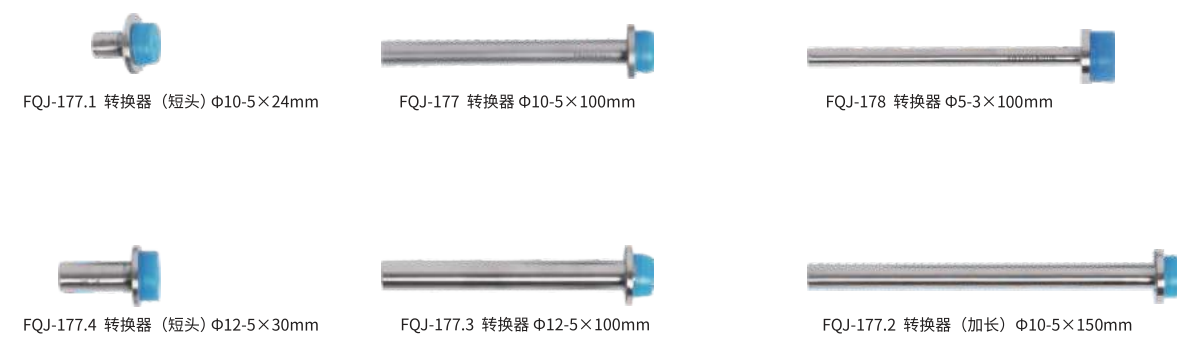


塑料夹钳 Clip Applicator (腹腔) $\Phi 5/\Phi 10 \times 330\text{mm}$

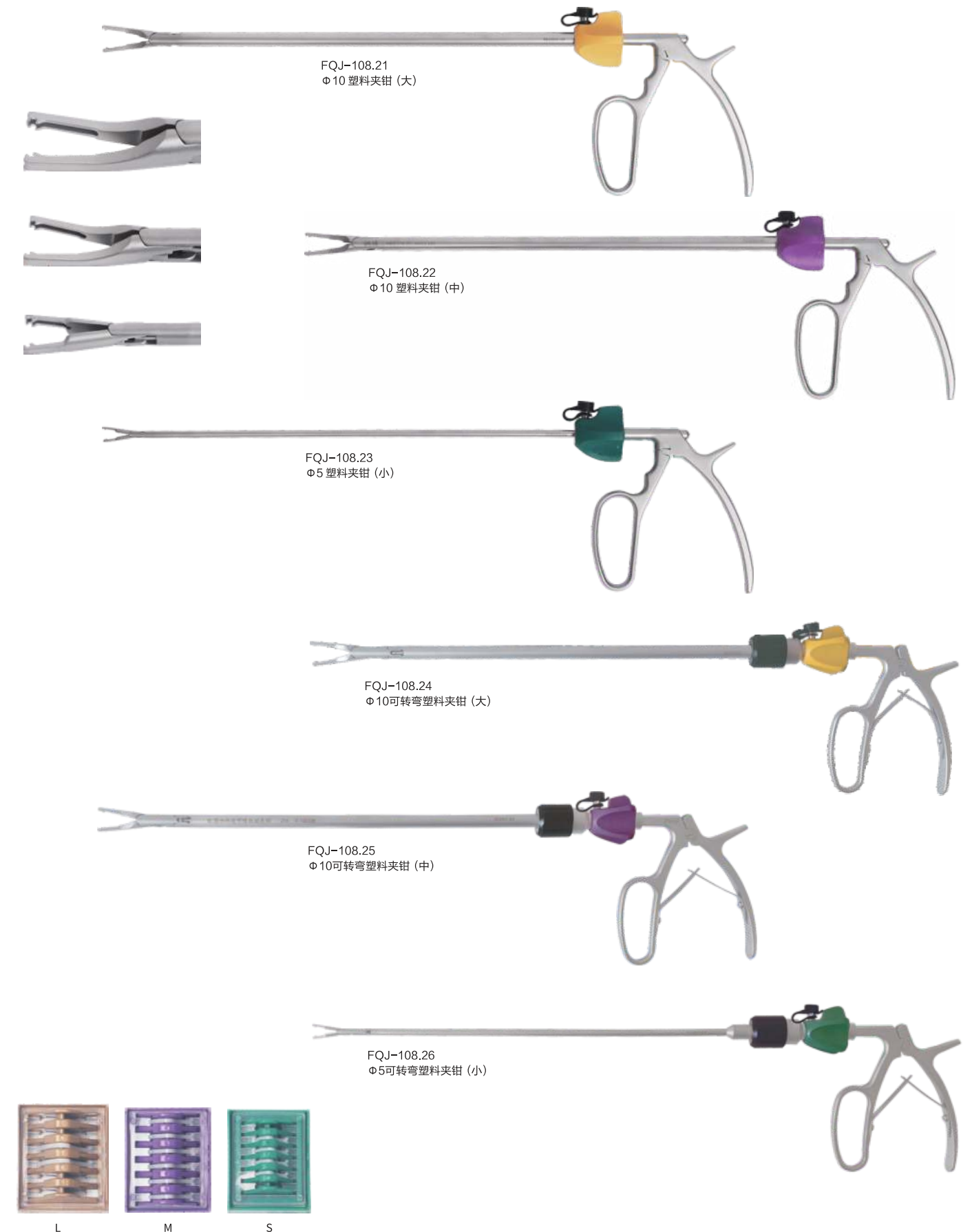


塑料夹钳 Clip Applicator (开放式)

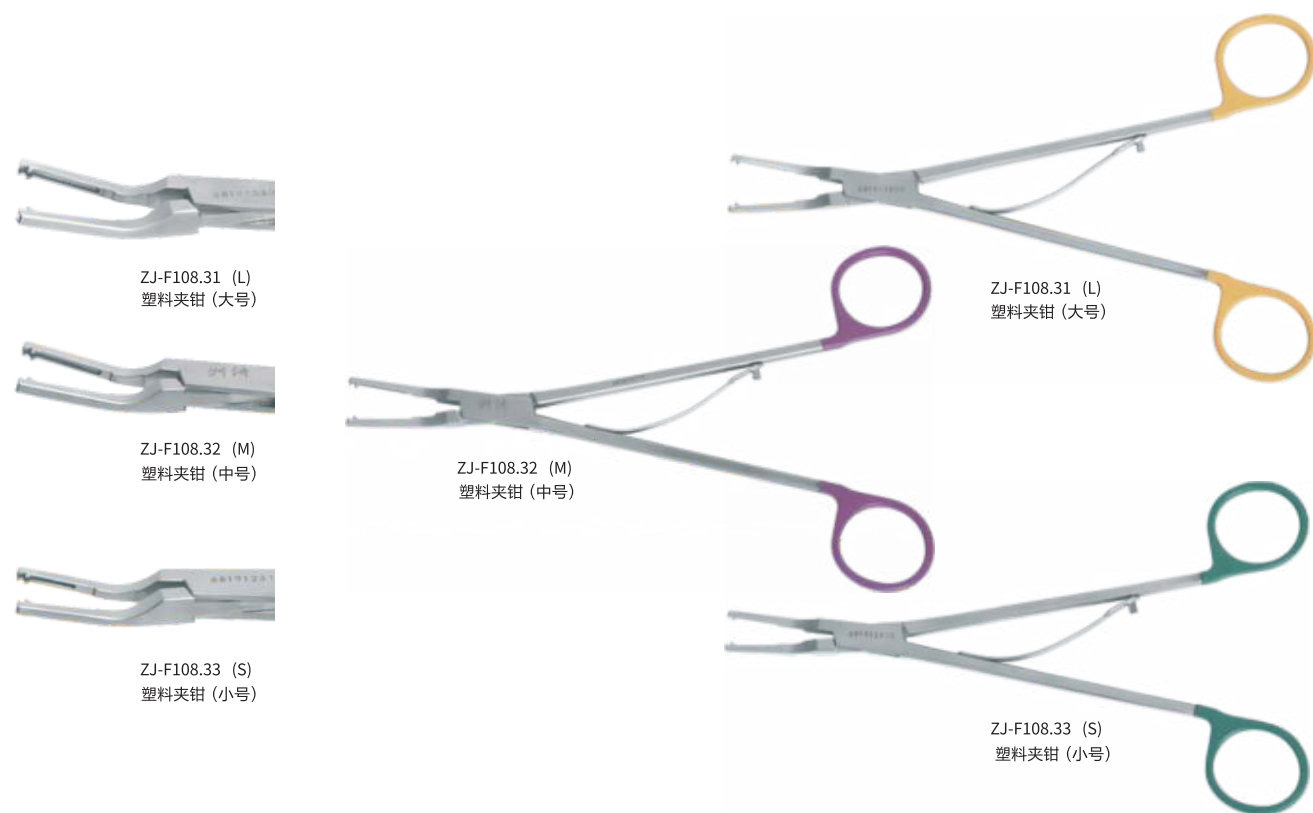

可吸收施夹钳 Clip Applicator

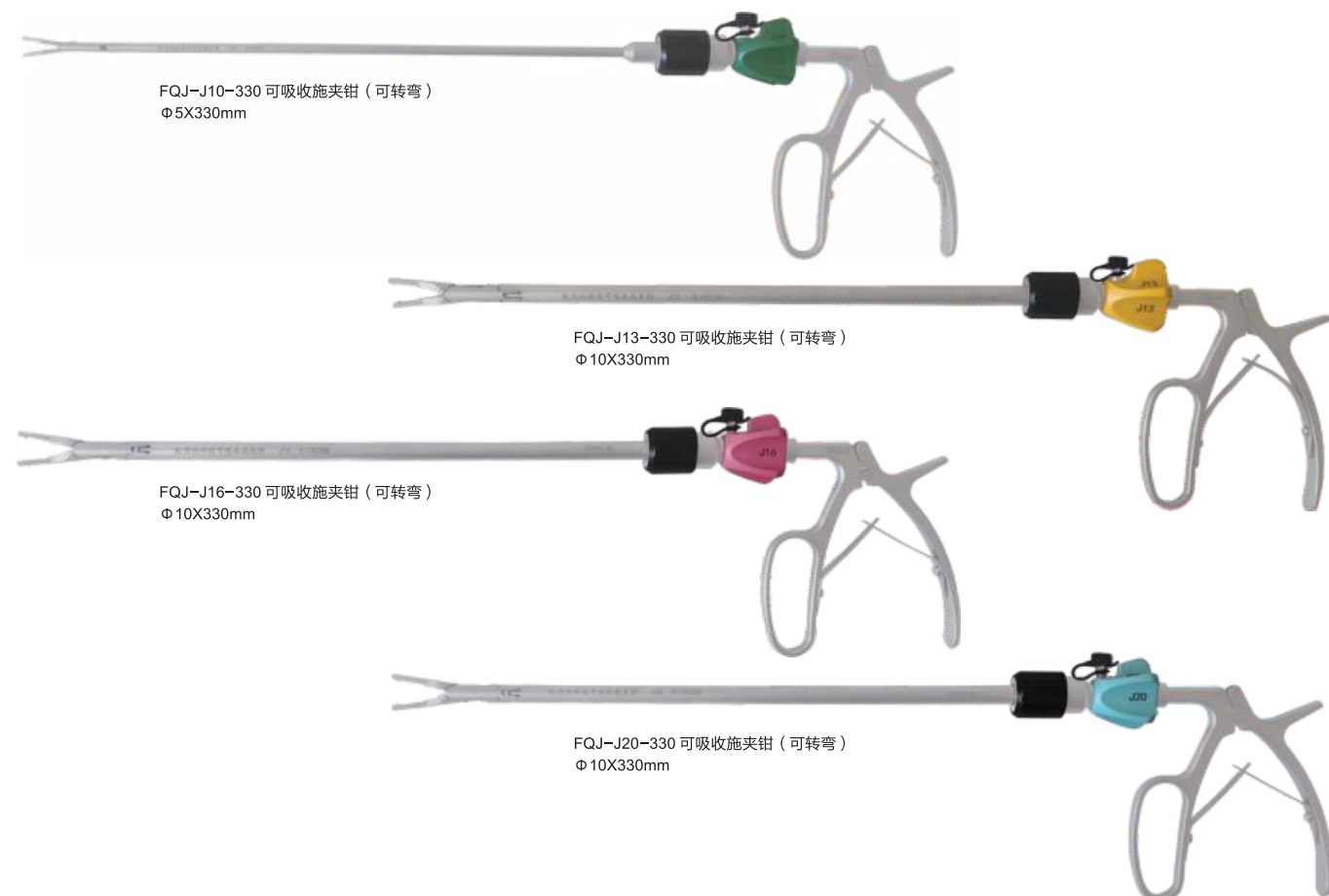

可吸收施夹钳 Clip Applicator

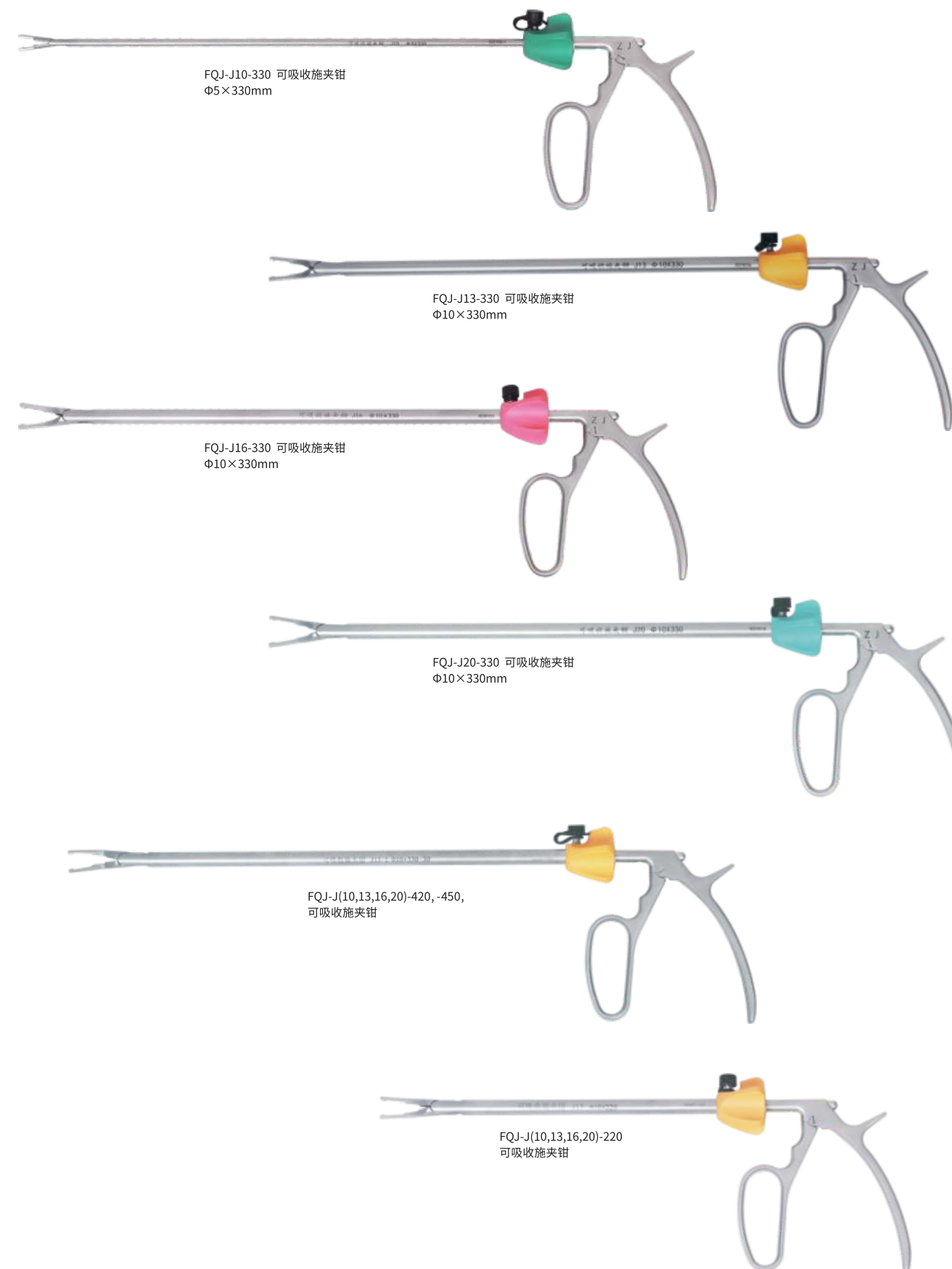

钛夹钳 Clip Applicator $\Phi 5/\Phi 10 \times 330\text{mm}$




生物夹钳 Clip Applicator $\Phi 10 \times 330\text{mm}$




施夹钳 Clip Applicator $\Phi 10 \times 330\text{mm}$



哈巴狗抓钳 Artery/Vein Clip, Clip Applier $\Phi 10 \times 330\text{mm}$

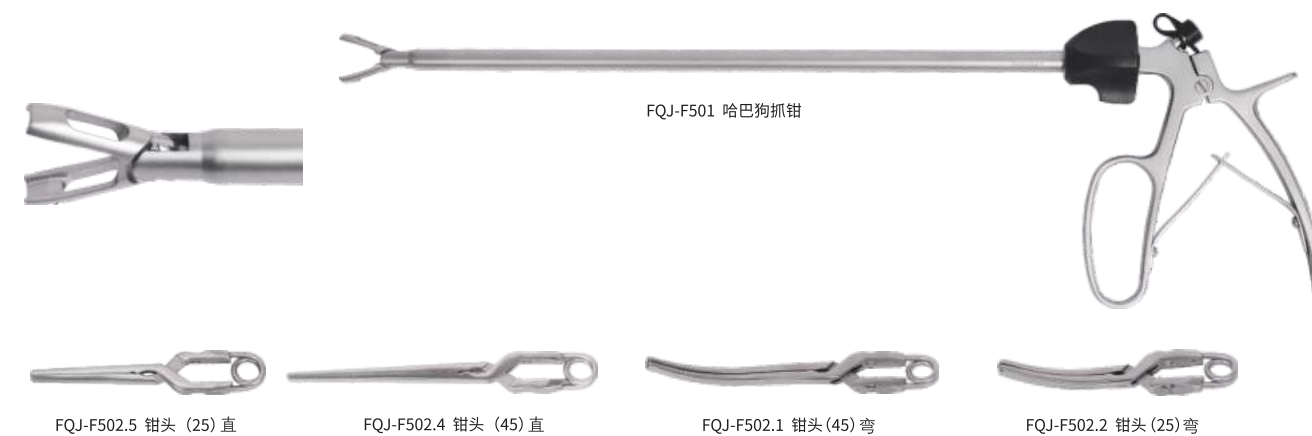


弹簧抓钳 Spring grasping forceps $\Phi 5 \times 330\text{mm}$

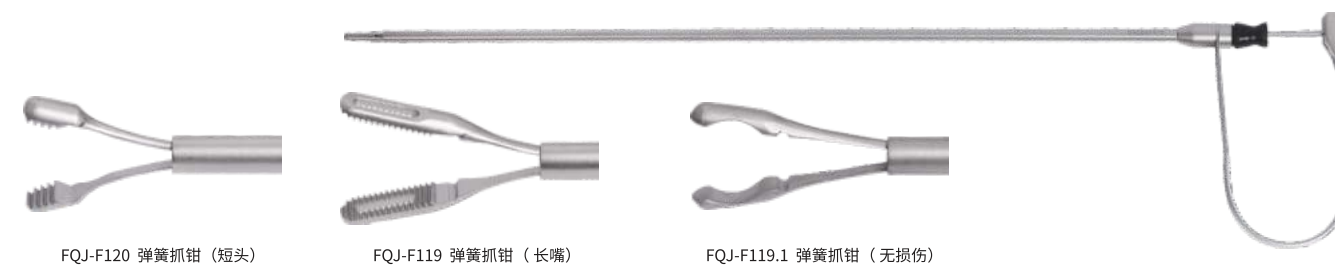

胆道造影钳 Bile duct forceps $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



金手指拉钩 Forceps

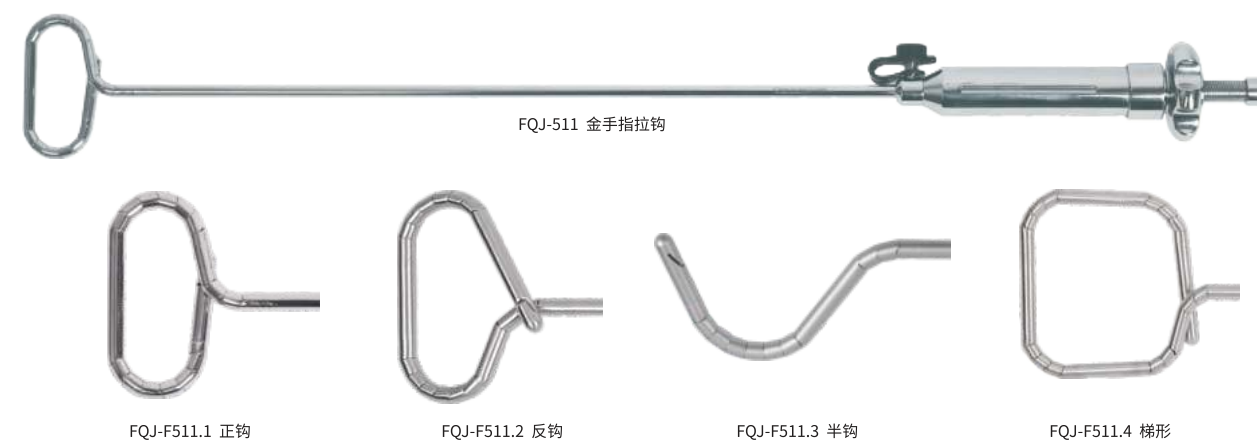

穿刺器、密封帽 Trocar, Sealedcap



十字密封穿刺器
FQJ-F163.11 Φ5.5X105mm
FQJ-F163.12 Φ10.5X105mm



十字密封带保护穿刺器
FQJ-F163.13 Φ5.5X105mm
FQJ-F163.14 Φ10.5X105mm



十字密封带转换穿刺器
FQJ-F163.15 Φ10.5X105mm
FQJ-F163.16 Φ12.5X105mm



磁片穿刺器
FQJ-F162.11 Φ3.5X75mm
FQJ-F162.12 Φ5.5X105mm
FQJ-F162.13 Φ10.5X105mm
FQJ-F162.14 Φ12.5X105mm
FQJ-F162.15 Φ13.5X105mm



磁片穿刺器(带保护)
FQJ-F162.16 Φ5.5X105mm
FQJ-F162.17 Φ10.5X105mm
FQJ-F162.18 Φ12.5X105mm



磁片带螺纹穿刺器
FQJ-F162.19 Φ5.5X105mm
FQJ-F162.20 Φ10.5X105mm
FQJ-F162.21 Φ12.5X105mm



磁片穿刺器带转换
FQJ-F162.22 Φ10.5X105mm
FQJ-F162.23 Φ12.5X105mm
FQJ-F162.24 Φ10.5X105mm带保护、带转换



新款磁片穿刺器
FQJ-F161.11 Φ5.5X105mm
FQJ-F161.12 Φ10.5X105mm



新款磁片带保护穿刺器
FQJ-F161.13 Φ5.5X105mm
FQJ-F161.14 Φ10.5X105mm



新款磁片带螺纹
FQJ-F161.15 Φ5.5X105mm
FQJ-F161.16 Φ10.5X105mm



新款磁片带转换
FQJ-F161.17 Φ10.5X105mm
FQJ-F161.18 Φ12.5X105mm



穿刺器(金属螺杆)
FQJ-X112 Φ5.5mm
FQJ-X113 Φ10.5mm
FQJ-X114 Φ12.5mm




持针钳 Needle-hoding forceps Φ5×330mm



FQJ-117 持针钳


FQJ-117.1 弯柄持针钳

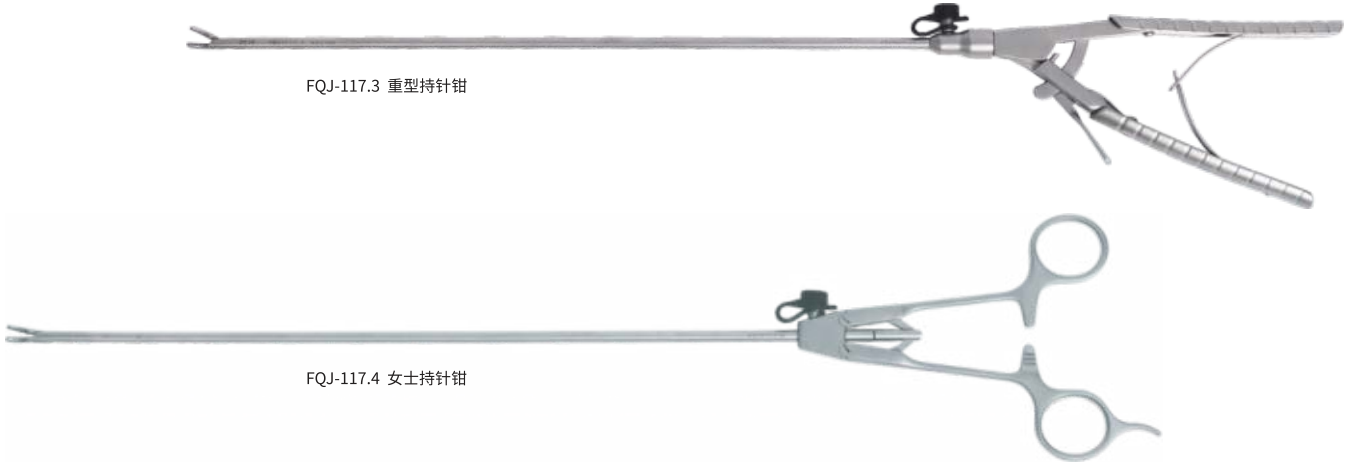

FQJ-117.3 重型持针钳

FQJ-117.4 女士持针钳

持针钳 Needle-hoding forceps Φ5×330mm

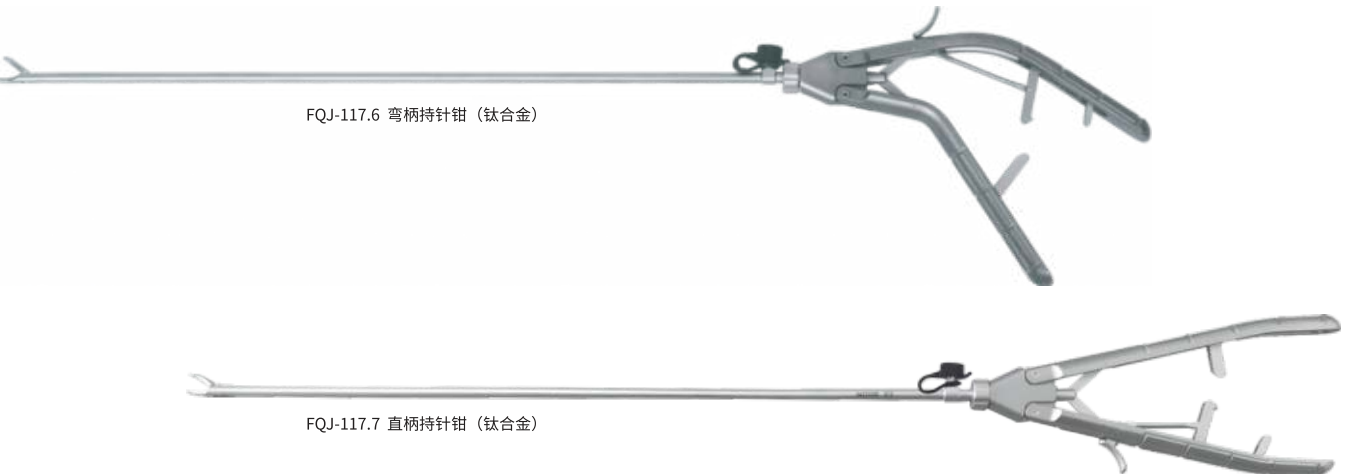

FQJ-117.6 弯柄持针钳(钛合金)

FQJ-117.7 直柄持针钳(钛合金)



FQJ-116 A型直头持针钳



FQJ-117 A型弯头持针钳




FQJ-193 自动复位持针钳




FQJ-361 复位夹线持针钳


疝气针、穿刺缝合针 Bile duct needle, Protctive obturator blunt

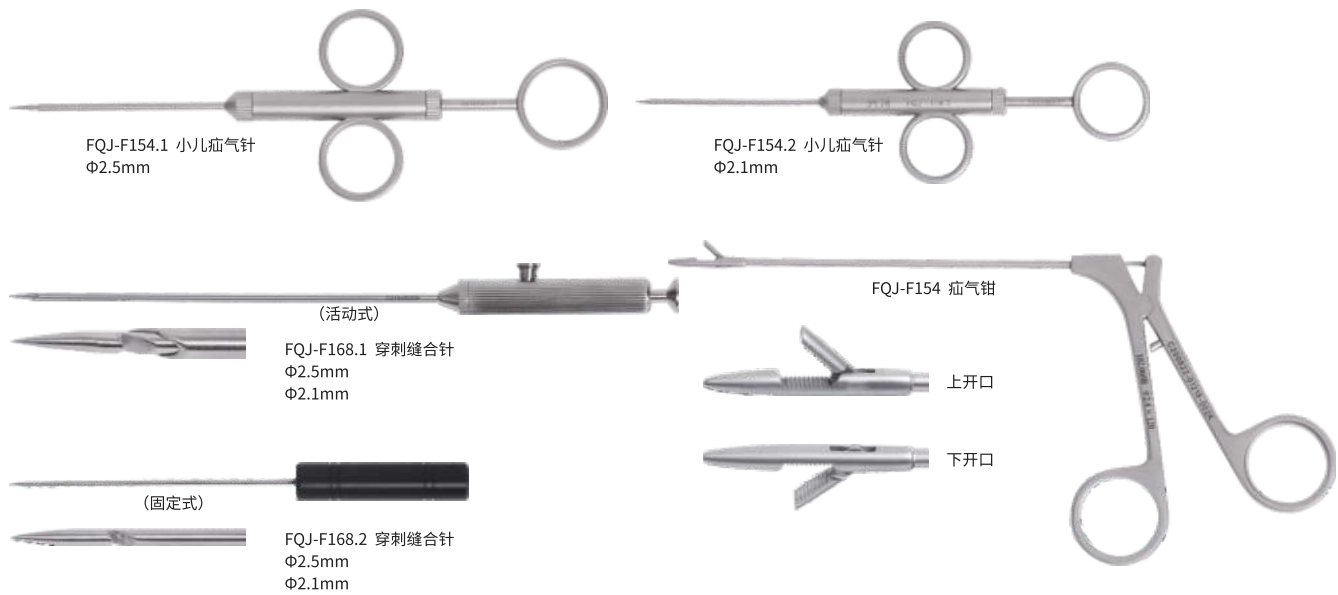

胆总管切开刀 Cholangiotome Φ5/Φ10×330mm

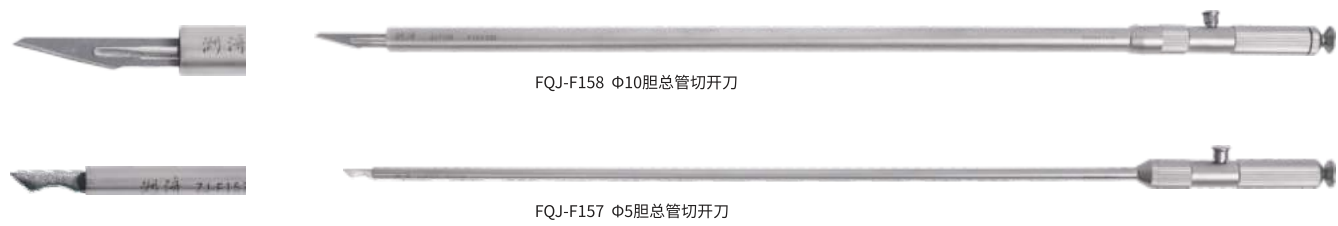

胆管针 Bile duct needle

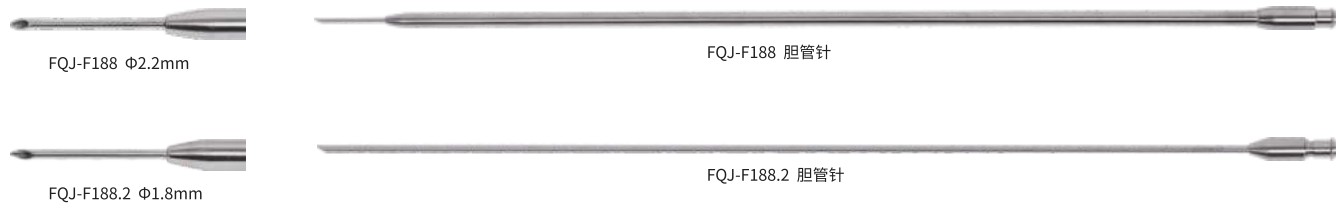


气腹针 Veress needle




打结钳 Knot forceps Φ5×330mm



三叶钳、五叶钳 Fan-shaped forceps Φ5/10×330mm

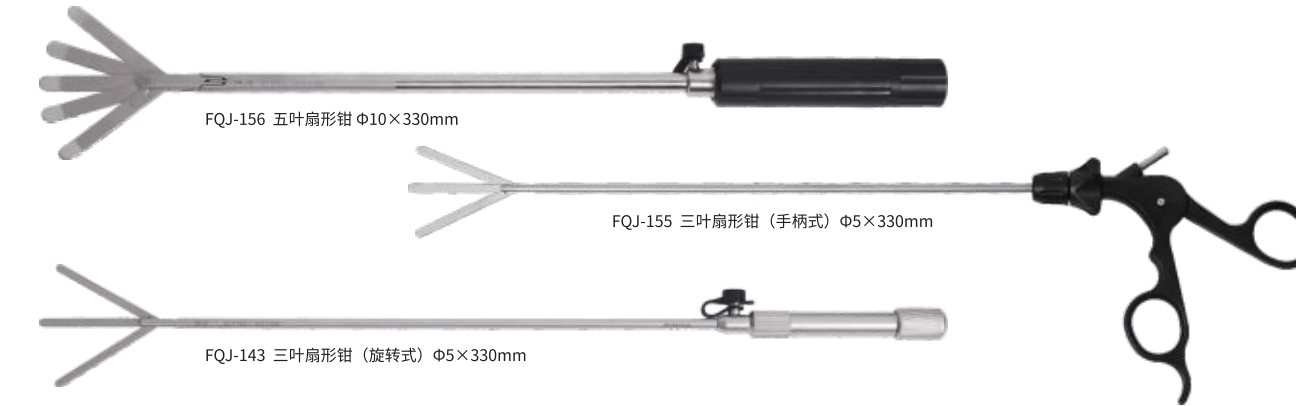

推结器 Knot pushe Φ5×330mm

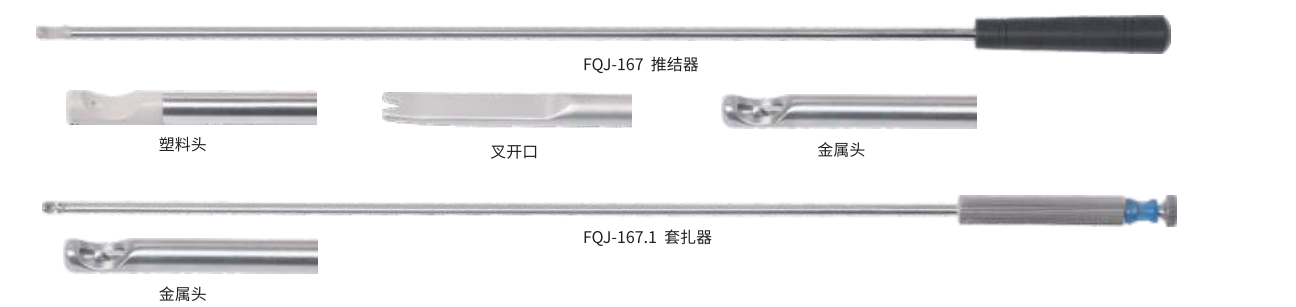

撑开器 Spreader




荷包抓钳 Clamp purse



2018款钳子装/拆标准流程

简捷、轻便的装/拆标准流程，
高效使用，缩减临床流程。


安装流程

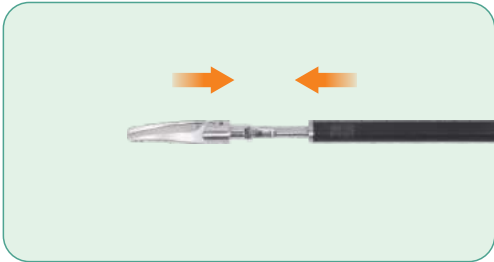

1 安装轴杆
滑动绝缘套管，将其套在内芯上；



2 安装轴杆
握住钳头旋转套管，锁紧，完成轴杆安装；

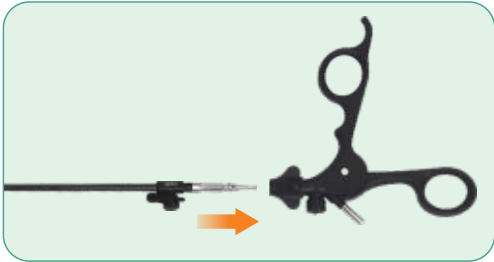


3 将轴杆插入手柄
推动轴杆进入手柄，直至卡嵌到位；(注意：不要顶住后手柄部件)




4 组装完成、测试
通过张开、闭合手柄，测试器械组合后的功能。


拆卸流程

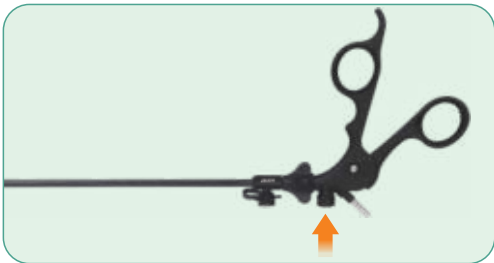


1 松开轴杆各和手柄
按压调节按钮，直至轴杆关卡弹开；(注意：不要顶住后手柄部件)

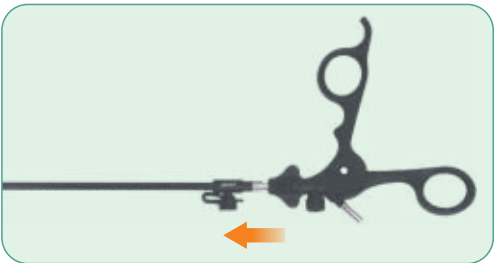

2 从手柄中拉出轴杆
拉动轴杆，使其从手柄上脱出；

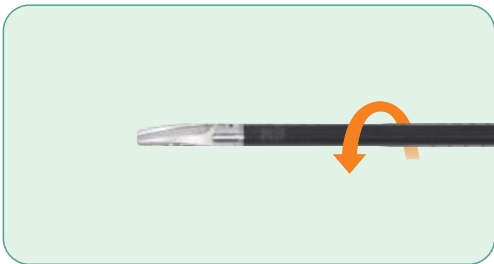

3 拆卸轴杆
握住钳头旋转套管，使内芯呈活动状态；

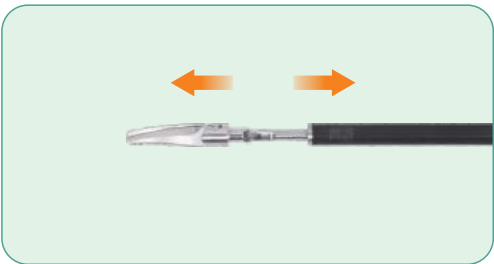

4 拆卸轴杆
抽出内芯，脱去绝缘套管。

2018款各种钳头、手柄 5×330mm (特殊尺寸可定制)



FQJ-FS125 钩剪
钳头长度10mm



FQJ-FS126 单动直剪
钳头长度14mm



FQJ-FS127 单动弯剪
钳头长度14mm




FQJ-FS128 双动直剪
钳头长度16mm




FQJ-FS129 双动弯剪
钳头长度16mm




FQJ-FS129.1 双动弯剪(带球)
钳头长度14mm

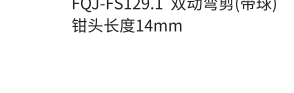

FQJ-FS129.2 微型双动弯剪
钳头长度13mm

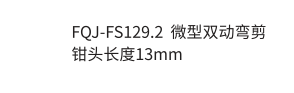

FQJ-FS129.3 双动弯剪 (包夹片)
钳头长度16mm

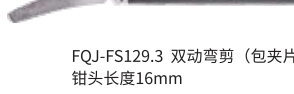

FQJ-FS352 微型剪
钳头长度13mm



FQJ-FS132 直分离钳
钳头长度18mm



FQJ-FS133 弯分离钳
钳头长度18mm



FQJ-FS133.1 短头弯分离钳
钳头长度14mm



FQJ-FS133.2 弯分离钳45°
钳头长度18mm



FQJ-FS133.3 弯分离钳 (长头)
钳头长度25mm



FQJ-FS133.4 弯分离钳70°
钳头长度18mm




FQJ-FS133.6 钝头弯分离钳
钳头长度18mm




FQJ-FS133.7 弯分离钳30°
钳头长度18mm




FQJ-FS133.8 弯分离钳 (包夹片)
钳头长度18mm

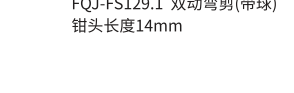

FQJ-FS133.9 钝头弯分离钳
钳头长度19mm

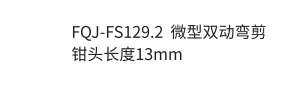

FQJ-FS134 直分离钳
钳头长度18mm 斜头长度5mm

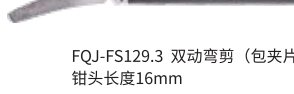

FQJ-FS134.1 直角分离钳 (长头)
钳头长度24mm 斜头长度9mm



FQJ-FS134.2 钩型分离钳
钳头长度20mm



FQJ-FS145 粘连物分离钳
钳头长度12mm



FQJ-FS111 鸭嘴抓钳
钳头长度14mm



FQJ-FS112.2 狼牙抓钳
钳头长度21mm



FQJ-FS118 尖头抓取钳
钳头长度18mm



FQJ-FS121 抓取钳
钳头长度22mm




FQJ-FS121.1 一般抓钳
钳头长度26mm




FQJ-FS121.2 圆头抓取钳
钳头长度15mm




FQJ-FS121.4 海豚嘴抓钳
钳头长度15mm

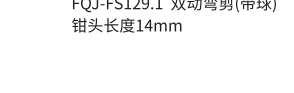

FQJ-FS125 钩剪
钳头长度10mm

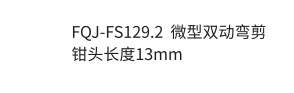

FQJ-FS126 单动直剪
钳头长度14mm

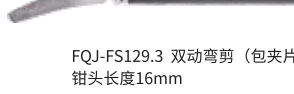

FQJ-FS127 单动弯剪
钳头长度14mm



FQJ-FS128 双动直剪
钳头长度16mm



FQJ-FS129 双动弯剪
钳头长度16mm



FQJ-FS129.1 双动弯剪(带球)
钳头长度14mm



FQJ-FS129.2 微型双动弯剪
钳头长度13mm



FQJ-FS129.3 双动弯剪 (包夹片)
钳头长度16mm



FQJ-FS352 微型剪
钳头长度13mm




FQJ-FS132 直分离钳
钳头长度18mm




FQJ-FS133 弯分离钳
钳头长度18mm




FQJ-FS133.1 短头弯分离钳
钳头长度14mm

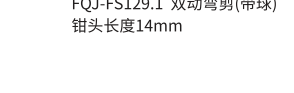

FQJ-FS133.2 弯分离钳45°
钳头长度18mm

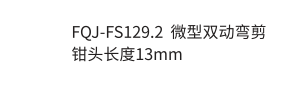

FQJ-FS133.3 弯分离钳 (长头)
钳头长度25mm

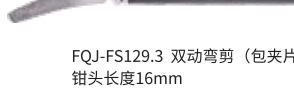

FQJ-FS133.4 弯分离钳70°
钳头长度18mm



FQJ-FS133.6 钝头弯分离钳
钳头长度18mm



FQJ-FS133.7 弯分离钳30°
钳头长度18mm



FQJ-FS133.8 弯分离钳 (包夹片)
钳头长度18mm



FQJ-FS133.9 钝头弯分离钳
钳头长度19mm



FQJ-FS134 直分离钳
钳头长度18mm 斜头长度5mm



FQJ-FS134.1 直角分离钳 (长头)
钳头长度24mm 斜头长度9mm




FQJ-FS134.2 钩型分离钳
钳头长度20mm




FQJ-FS145 粘连物分离钳
钳头长度12mm




FQJ-FS111 鸭嘴抓钳
钳头长度14mm

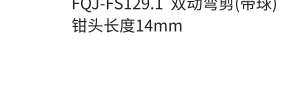

FQJ-FS112.2 狼牙抓钳
钳头长度21mm

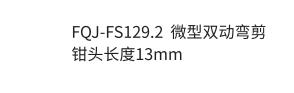

FQJ-FS118 尖头抓取钳
钳头长度18mm

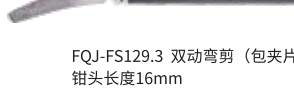

FQJ-FS121 抓取钳
钳头长度22mm



FQJ-FS121.1 一般抓钳
钳头长度26mm



FQJ-FS121.2 圆头抓取钳
钳头长度15mm



FQJ-FS121.4 海豚嘴抓钳
钳头长度15mm



FQJ-FS125 钩剪
钳头长度10mm



FQJ-FS126 单动直剪
钳头长度14mm



FQJ-FS127 单动弯剪
钳头长度14mm




FQJ-FS128 双动直剪
钳头长度16mm




FQJ-FS129 双动弯剪
钳头长度16mm




FQJ-FS129.1 双动弯剪(带球)
钳头长度14mm

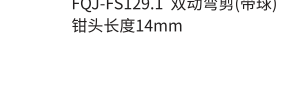

FQJ-FS129.2 微型双动弯剪
钳头长度13mm

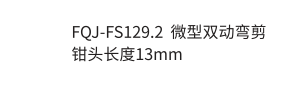

FQJ-FS129.3 双动弯剪 (包夹片)
钳头长度16mm

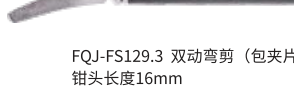

FQJ-FS352 微型剪
钳头长度13mm



FQJ-FS132 直分离钳
钳头长度18mm



FQJ-FS133 弯分离钳
钳头长度18mm



FQJ-FS133.1 短头弯分离钳
钳头长度14mm



FQJ-FS133.2 弯分离钳45°
钳头长度18mm



FQJ-FS133.3 弯分离钳 (长头)
钳头长度25mm



FQJ-FS133.4 弯分离钳70°
钳头长度18mm




FQJ-FS133.6 钝头弯分离钳
钳头长度18mm




FQJ-FS133.7 弯分离钳30°
钳头长度18mm




FQJ-FS133.8 弯分离钳 (包夹片)
钳头长度18mm

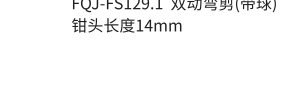

FQJ-FS133.9 钝头弯分离钳
钳头长度19mm

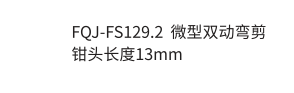

FQJ-FS134 直分离钳
钳头长度18mm 斜头长度5mm

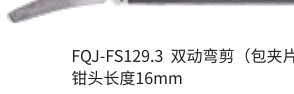

FQJ-FS134.1 直角分离钳 (长头)
钳头长度24mm 斜头长度9mm



FQJ-FS134.2 钩型分离钳
钳头长度20mm



FQJ-FS145 粘连物分离钳
钳头长度12mm



FQJ-FS111 鸭嘴抓钳
钳头长度14mm



FQJ-FS112.2 狼牙抓钳
钳头长度21mm



FQJ-FS118 尖头抓取钳
钳头长度18mm



FQJ-FS121 抓取钳
钳头长度22mm




FQJ-FS121.1 一般抓钳
钳头长度26mm




FQJ-FS121.2 圆头抓取钳
钳头长度15mm




FQJ-FS121.4 海豚嘴抓钳
钳头长度15mm

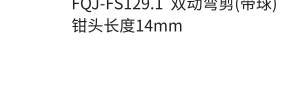

FQJ-FS125 钩剪
钳头长度10mm

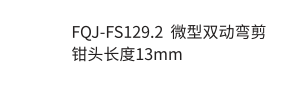

FQJ-FS126 单动直剪
钳头长度14mm

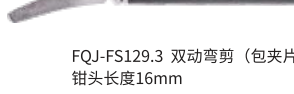

FQJ-FS127 单动弯剪
钳头长度14mm



FQJ-FS128 双动直剪
钳头长度16mm



FQJ-FS129 双动弯剪
钳头长度16mm



FQJ-FS129.1 双动弯剪(带球)
钳头长度14mm



FQJ-FS129.2 微型双动弯剪
钳头长度13mm



FQJ-FS129.3 双动弯剪 (包夹片)
钳头长度16mm



FQJ-FS352 微型剪
钳头长度13mm




FQJ-FS132 直分离钳
钳头长度18mm




FQJ-FS133 弯分离钳
钳头长度18mm




FQJ-FS133.1 短头弯分离钳
钳头长度14mm

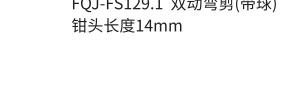

FQJ-FS133.2 弯分离钳45°
钳头长度18mm

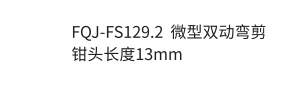

FQJ-FS133.3 弯分离钳 (长头)
钳头长度25mm

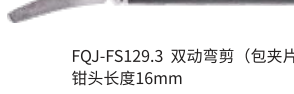

FQJ-FS133.4 弯分离钳70°
钳头长度18mm



F

2018款各种钳头、手柄 5×330mm (特殊尺寸可定制)



FQJ-FS122 中空直齿抓钳
钳头长度16mm



FQJ-FS122.1 单动中空直齿抓钳
钳头长度16mm



FQJ-FS122.2 中空横齿抓钳
钳头长度16mm



FQJ-FS122.3 中空直齿抓钳 (2X3齿)
钳头长度15mm



FQJ-FS123.1 无损伤抓钳(圆头)
钳头长度24mm



FQJ-FS123.2 无损伤抓钳(扁头)
钳头长度18mm



FQJ-FS123.3 无损伤抓钳(方头)
钳头长度20mm



FQJ-FS123.4 单动无损伤抓钳
钳头长度28mm



FQJ-FS223 无损伤小抓钳
钳头长度22mm



FQJ-FS124 无损伤抓钳(弯)
钳头长度15mm



FQJ-FS130 匙形活钳(带针)
钳头长度16mm



FQJ-FS131 匙形活钳
钳头长度16mm



FQJ-FS131.1 单动带齿匙形活钳
钳头长度27mm



FQJ-FS131.2 匙形活钳(带齿)
钳头长度16mm



FQJ-FS131.3 单动尖头活钳
钳头长度19mm



FQJ-FS133.10 弯分离钳
钳头长度25,33,40mm



FQJ-FS135 细齿钝头抓钳
钳头长度17mm



FQJ-FS135.1 钝头中空抓钳
钳头长度13mm



FQJ-FS135.2 钝头抓钳
钳头长度20mm



FQJ-FS136.1 粗齿钝头抓钳
钳头长度15mm



FQJ-FS137 胆囊抓钳(方头)
钳头长度21mm



FQJ-FS137.1 胆囊抓钳(圆头)
钳头长度26mm



FQJ-FS138 鼠牙抓钳
钳头长度15mm



FQJ-FS138.1 鼠齿抓钳(细齿)
钳头长度15mm

2018款各种钳头、手柄 5×330mm (特殊尺寸可定制)



FQJ-FS138.2 鼠齿抓钳(粗齿)
钳头长度18mm



FQJ-FS138.4 单动鼠齿抓钳
钳头长度16mm



FQJ-FS139 阑尾抓钳
钳头长度26mm



FQJ-FS139.1 中空阑尾抓钳
钳头长度21mm



FQJ-FS141 卵巢抓钳
钳头长度18mm



FQJ-FS142 输卵管抓钳
钳头长度12mm



FQJ-FS142.2 长头输卵管抓钳
钳头长度20mm



FQJ-FS142.3 短头输卵管抓钳
钳头长度11mm



FQJ-FS192 输尿管抓钳
钳头长度16mm



FQJ-FS140 内脏抓钳
钳头长度34mm



FQJ-FS152.2 内脏抓钳(带孔)
钳头长度38mm



FQJ-FS152.3 内脏抓钳(中空)
钳头长度38mm



FQJ-FS141 长颌抓钳
钳头长度35mm



FQJ-FS141.1 扁头长颌抓钳
钳头长度35mm



FQJ-FS149 子宫系膜抓钳
钳头长度18mm



FQJ-FS150 咬切钳
钳头长度18mm



FQJ-FS152 无损伤肠钳
钳头长度25mm



FQJ-FS152.1 无损伤肠钳(无齿)
钳头长度24mm



FQJ-FS152.4 内脏中空抓钳单侧孔
钳头长度43mm



FQJ-FS152.5 内脏中空抓钳双侧孔
钳头长度43mm



FQJ-FS153 肺叶钳
钳头长度25mm



FQJ-FS193 吻合牵引钳
钳头长度17mm

2018款各种钳头、手柄 5×330mm (特殊尺寸可定制)



FQJ-FS194 八爪钳
钳头长度23mm



FQJ-FS195 V型抓钳
钳头长度15mm



FQJ-FS222 单动小抓钳
钳头长度25mm



FQJ-FS222.1 短头单动小抓钳
钳头长度18mm



FQJ-FS223.1 无损伤小抓钳
钳头长度27mm



FQJ-FS356 粗齿肠钳
钳头长度32mm



FQJ-FS356.1 粗齿肠钳 (带孔)
钳头长度22mm



FQJ-FS366 胃抓钳
钳头长度20mm



FQJ-FS354 倒齿抓钳
钳头长度16mm



FQJ-FS354.1 短头倒齿抓钳
钳头长度13mm



FQJ-FS355 重型抓钳
钳头长度19mm



FQJ-FS378 齿状抓钳
钳头长度21mm



FQJ-FS366.1 单动胃抓钳 (上翘)
钳头长度23mm



FQJ-FS366.2 双动胃抓钳(上翘)
钳头长度28mm



FQJ-FS377 胃圆头抓钳
钳头长度21mm



FQJ-FS359.1 粗齿无损伤抓钳(三孔)
钳头长度17mm



FQJ-FS359 粗齿无损伤抓钳
钳头长度22mm

各种钳头、手柄 Φ10×330mm



FQJ-X108 鸭嘴大抓钳



FQJ-F108.4 松夹钳



FQJ-F109 取石钳



FQJ-F110 大弯分离钳



FQJ-F111 宽嘴无齿抓钳



FQJ-F112 大型抓紧钳

各种钳头、手柄 Φ10×330mm



FQJ-F112.1 狼牙抓钳



FQJ-F114.2 直角分离钳 (短头)



FQJ-F114 直角分离钳 (长头)



FQJ-F371 双动大型弯剪



FQJ-F363 胃圆头抓钳



FQJ-F365 大型肺叶钳



FQJ-F366 胃抓钳



FQJ-X105 无损伤大抓钳



FQJ-X118 胆囊抓钳



FQJ-X200 可弯肠抓钳



FQJ-X201 板克抓钳



FQJ-X354 倒齿抓钳



ZJ-X106 长颌抓取钳



ZJ-X106.1 长颌抓取钳(扁头)



ZJ-X115 血管阻断抓钳




ZJ-X116 脾蒂血管钳



2016款钳子装/拆标准流程


简捷、轻便的装/拆标准流程，
高效使用，缩减临床流程。

安装流程

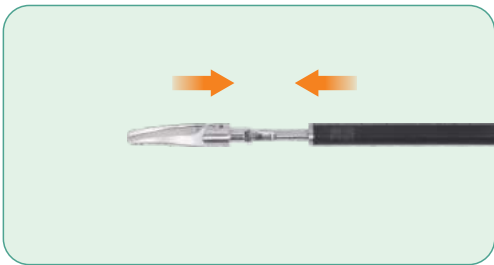

1 安装轴杆
滑动绝缘套管，将其套在内芯上；


3 将轴杆插入手柄
推动轴杆进入手柄，直至卡嵌到位；(注意：不要顶住后手柄部件)

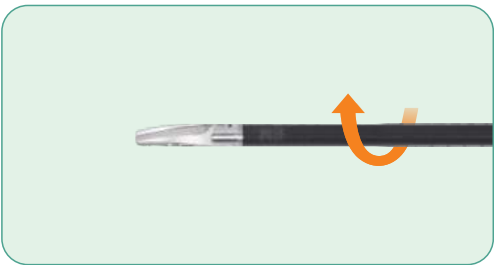

2 安装轴杆
握住钳头旋转套管，锁紧，完成轴杆安装；


4 组装完成、测试
通过张开、闭合手柄，测试器械组合后的功能。

拆卸流程

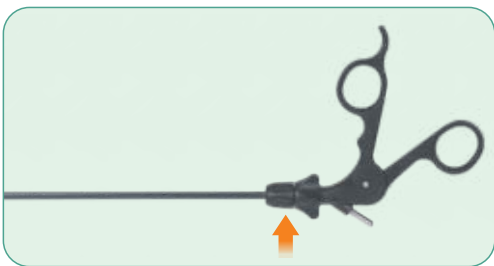

1 松开轴杆各和手柄
按压调节按钮，直至轴杆关卡弹开；(注意：不要顶住后手柄部件)


3 拆卸轴杆
握住钳头旋转套管，使内芯呈活动状态；

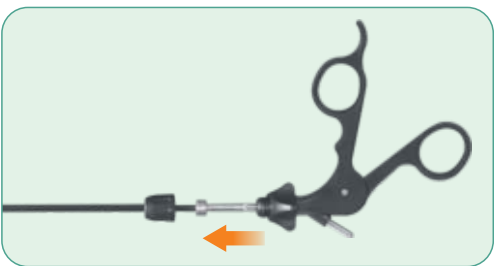


2 从手柄中拉出轴杆
拉动轴杆，使其从手柄上脱出；

4 拆卸轴杆
抽出内芯，脱去绝缘套管。


2016款各种钳头、手柄 5×330mm

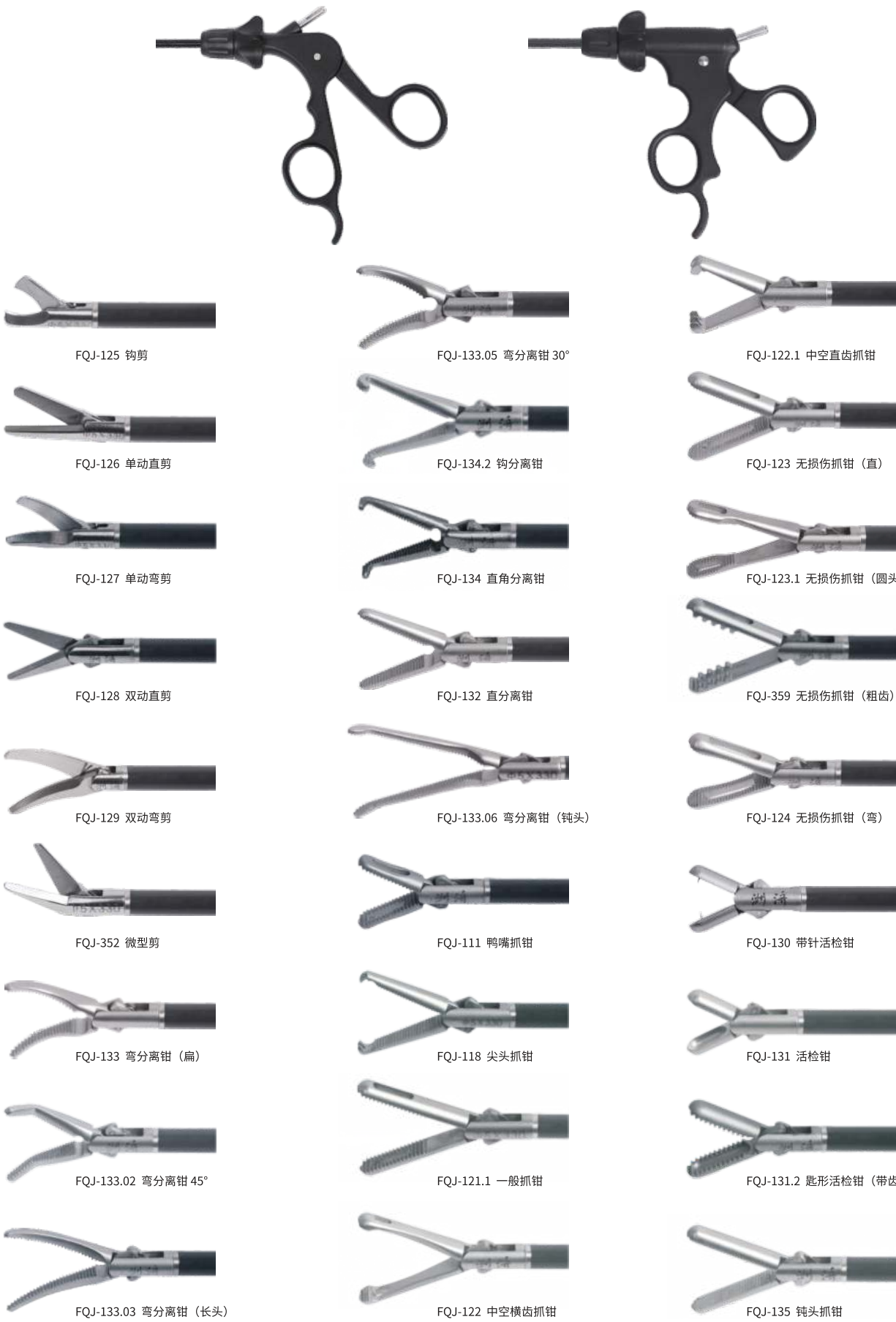

2016款各种钳头、手柄 5×330mm

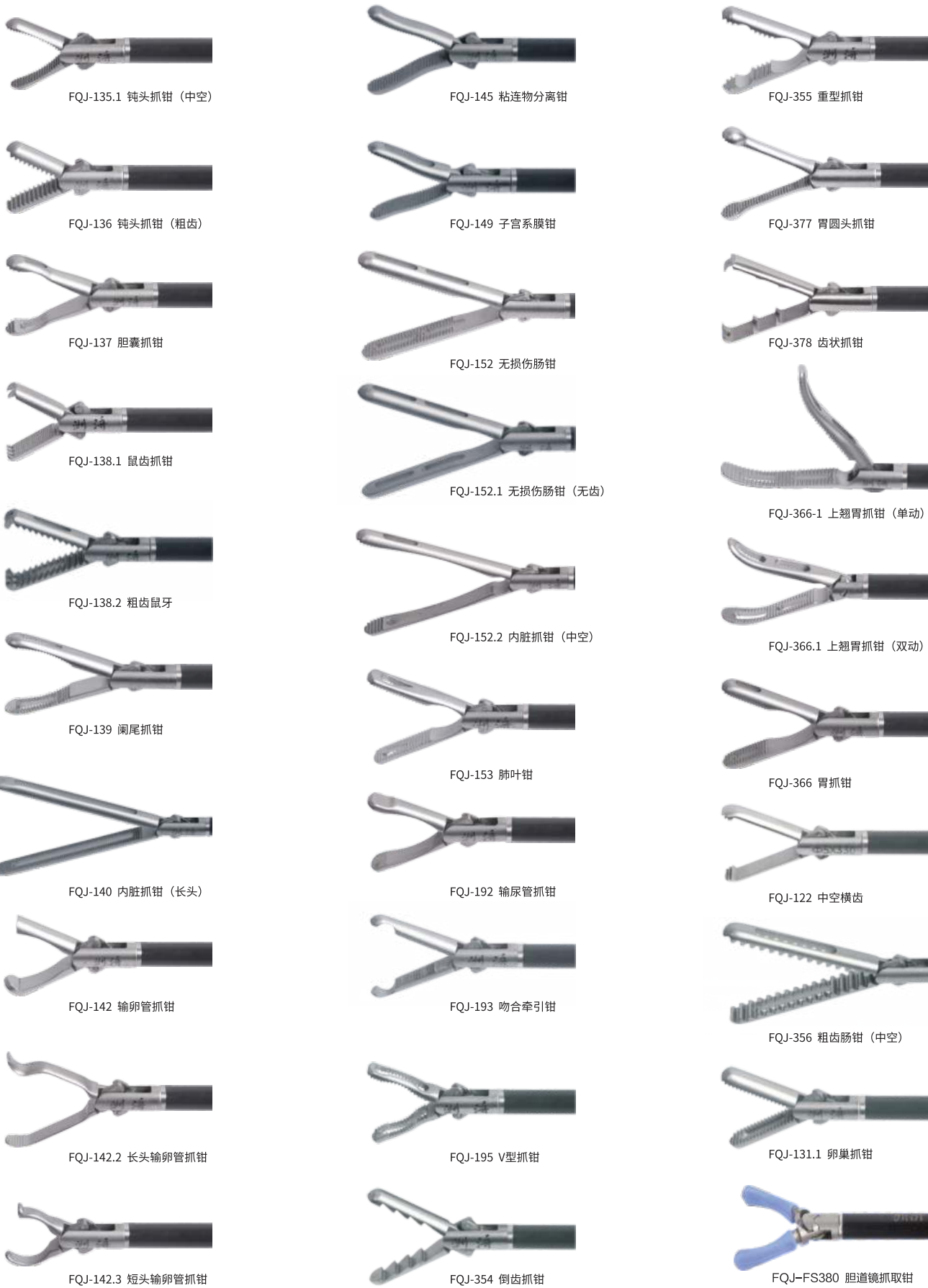

ZJ-WF型单孔组合式腹腔镜手术器械 Single-hole combined laparoscopic surgical instrument

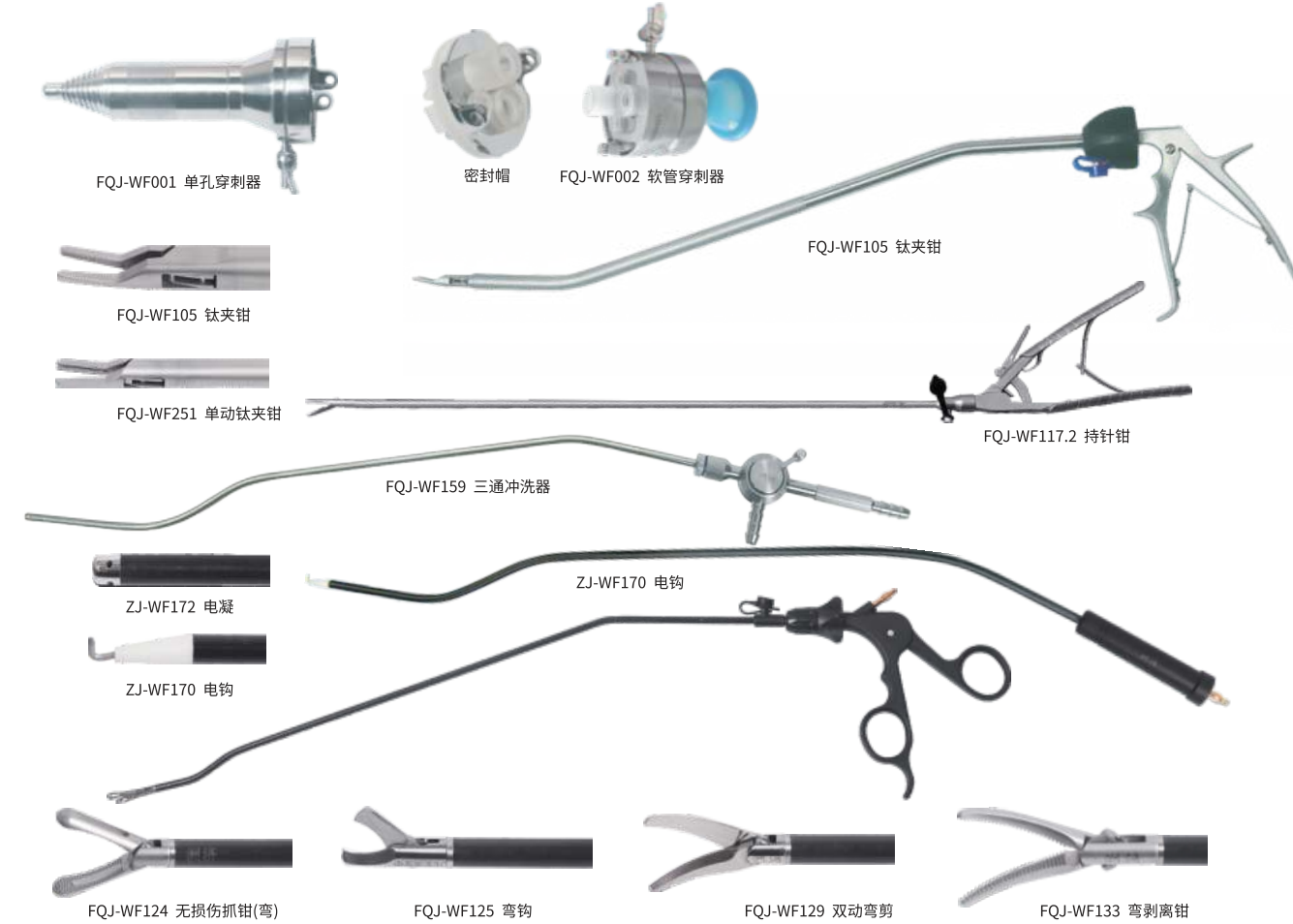

甲状腺手术器械 Thyroid operathing instrument




甲状腺手术器械 Thyroid operating instrument (甲状腺牵开器 甲状腺拉钩)

专利号: 201920050459.0



三通冲吸器 (枪型)
FQJ-159.1 $\Phi 5 \times 170\text{mm}$

单极分离钳
ZJ-F129.1 $\Phi 5 \times 170\text{mm}$

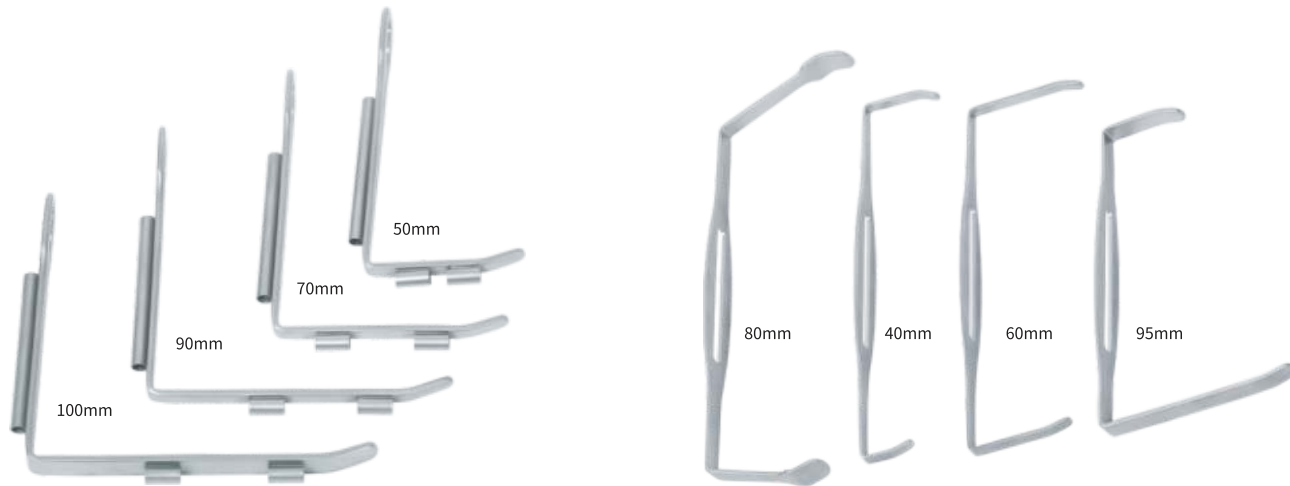


侧方拉钩
ZJ-J101(50mm)
ZJ-J102(70mm)
ZJ-J103(90mm)
ZJ-J104(100mm)

垂直拉钩
ZJ-J105(40mm)
ZJ-J106(60mm)
ZJ-J107(80mm)
ZJ-J108(95mm)



甲状腺牵开器 QKQ-I

胸腔镜双关节成套手术器械 Thoracotomy Instruments

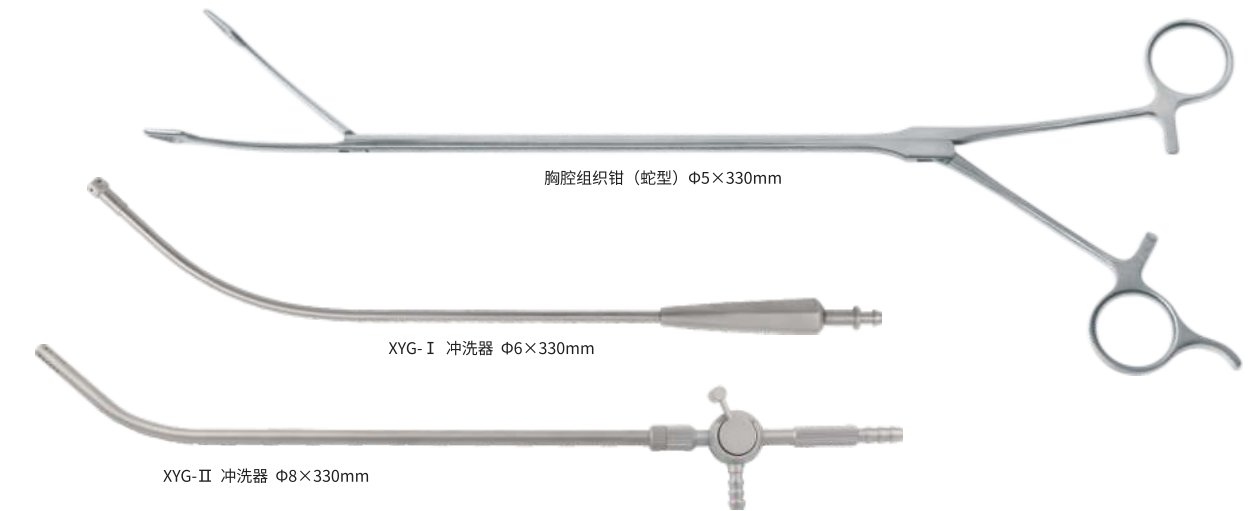

胸腔组织钳 (蛇型) $\Phi 5 \times 330\text{mm}$

XYG-I 冲洗器 $\Phi 6 \times 330\text{mm}$

XYG-II 冲洗器 $\Phi 8 \times 330\text{mm}$



ZXQ-1 胸腔止血钳 (直)
 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



ZXQ-2 胸腔止血钳 (弯)
 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



ZXQ-3 胸腔止血钳 (弧高10mm)
 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



ZXQ-4 胸腔止血钳 (弧高15mm)
 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



ZXQ-6 胸腔止血钳 (弧高25mm)
 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



ZXQ-7 胸腔止血钳 (弧高30mm)
 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



胸腔止血钳
ZXQ-8 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$ 70°
ZXQ-9 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$ 90°



心房持针钳
SGJ-01 (直头) $\Phi 5 \times 330\text{mm}$
SGJ-02 (弯头) $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



胸腔心血管外科用剪
SGJ-03 (大) $\Phi 5 \times 330\text{mm}$
SGJ-04 (小) $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



肺叶钳
SGJ-05 (大) 14.5mm $\Phi 5 \times 330\text{mm}$
SGJ-06 (小) 11.5mm $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



胸腔组织钳 (卵圆型)
SGJ-07 (大) 13.5mm $\Phi 5 \times 330\text{mm}$
SGJ-08 (小) 10.5mm $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



胸腔组织钳 (荷包型)
SGJ-09 (大) 10.5mm $\Phi 5 \times 330\text{mm}$
SGJ-10 (小) 7.5mm $\Phi 5 \times 330\text{mm}$



胸腔组织钳 (蛇型)
SGJ-11 (大) $\Phi 5 \times 330\text{mm}$
SGJ-12 (小) $\Phi 5 \times 330\text{mm}$




SGJ-13 胸腔组织钳 (有齿型)
 $\Phi 5 \times 330\text{mm}$




皮肤组织穿刺器
CKQ-I 5.5mm
CKQ-II 10.5mm
CKQ-III 12.5mm


电动子宫切除器及配套手术器械 Electric hystera-cutter

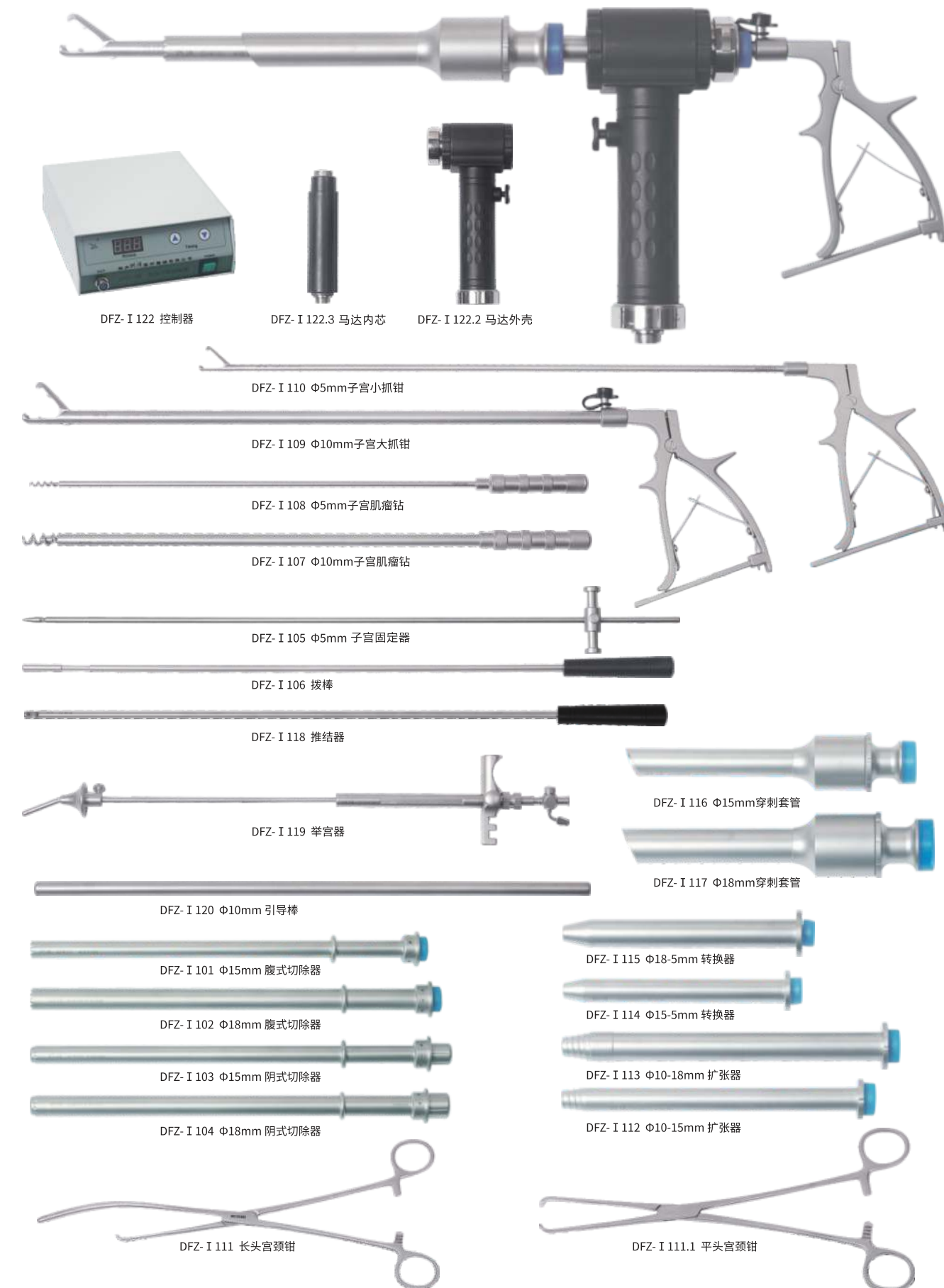


阴道切除手术器械 Vaginal instruments

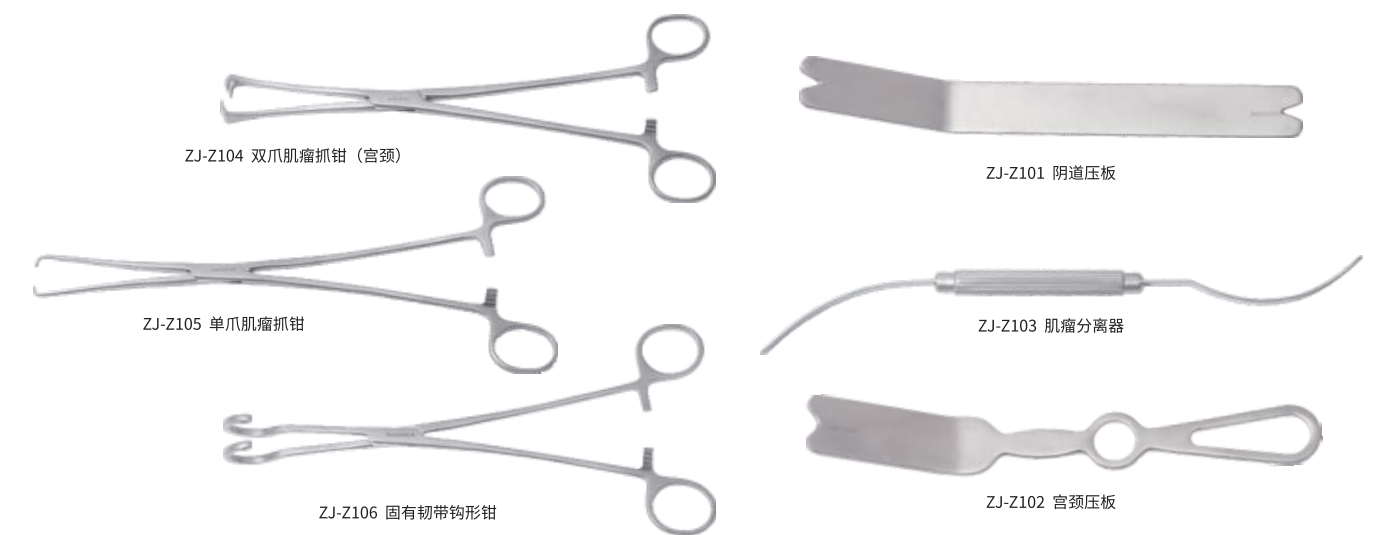

专用阴道拉钩 Special vaginal retractor

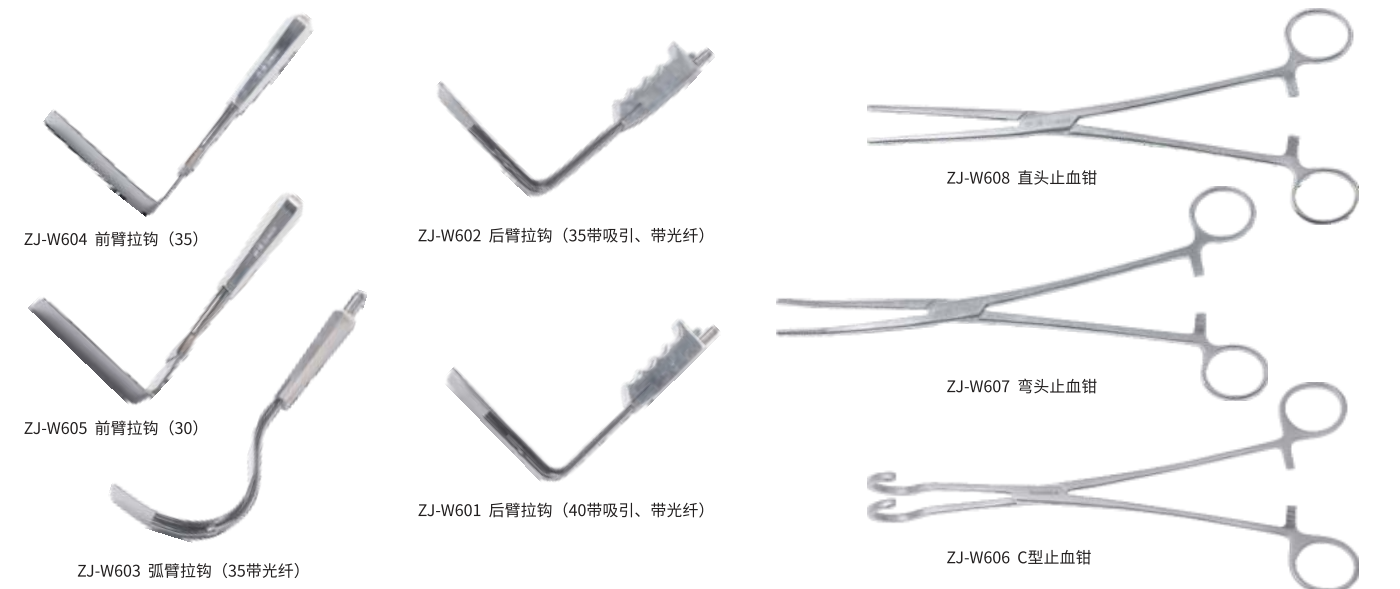


专用阴道缝合拉钩 Special vaginal retractor

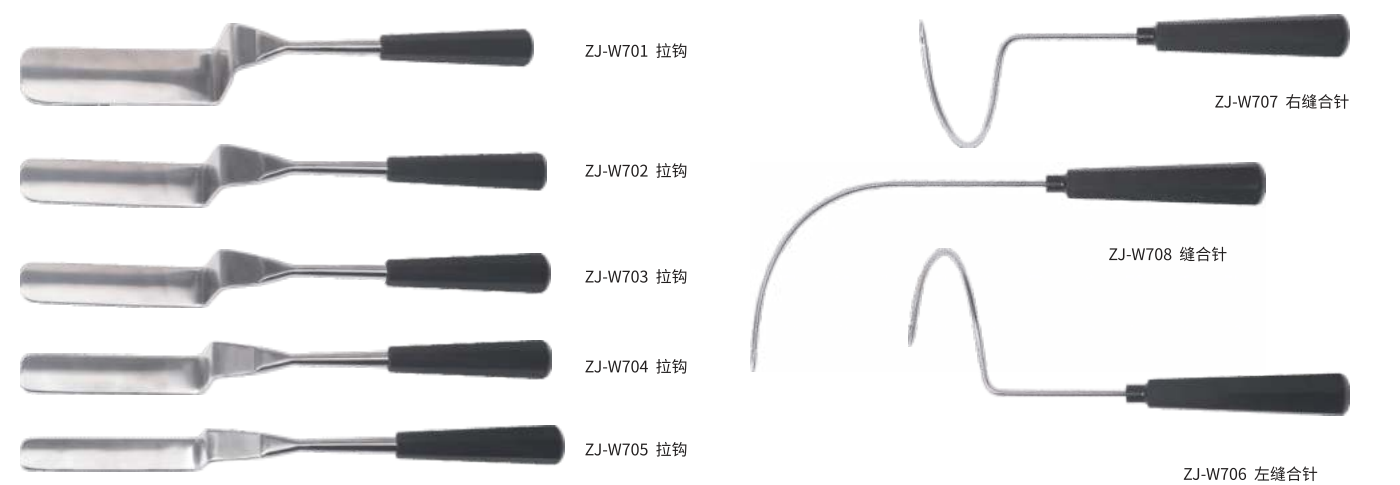

多功能举宫操纵器A型 Multifunctional uterus-lifting work apparatus

总装图

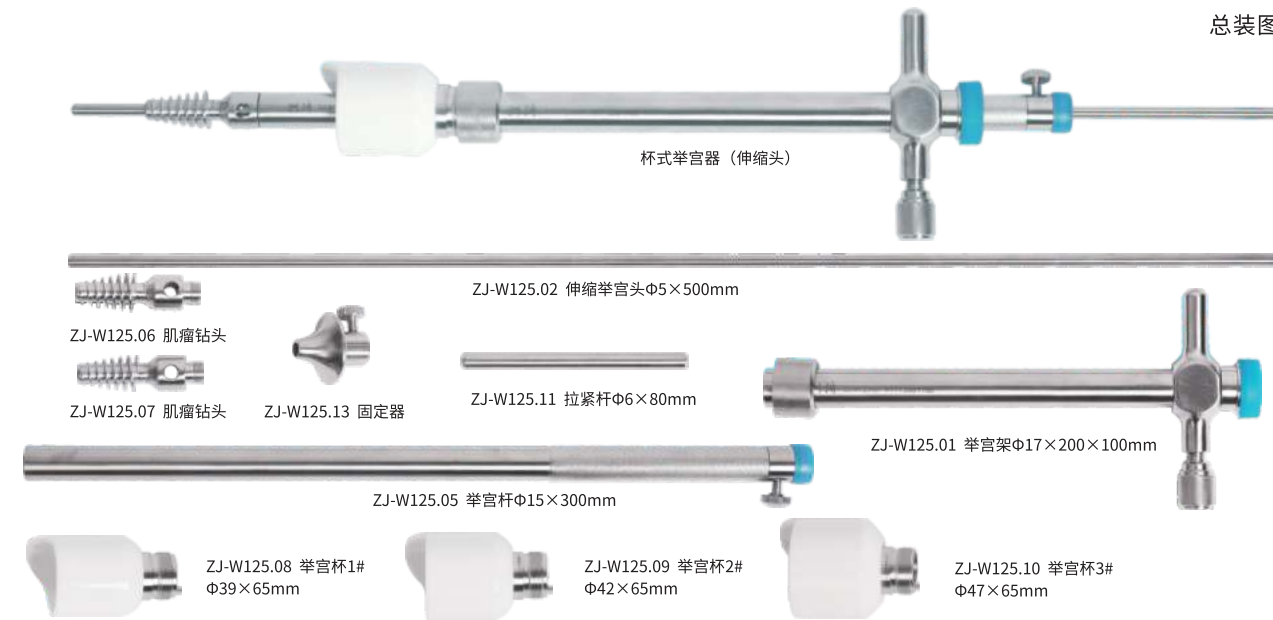

多功能举宫操纵器B型 Multifunctional uterus-lifting work apparatus

总装图




多功能举宫操纵器C型 Multifunctional uterus-lifting work apparatus

总装图




多功能举宫操纵器D型 Multifunctional uterus-lifting work apparatus

总装图

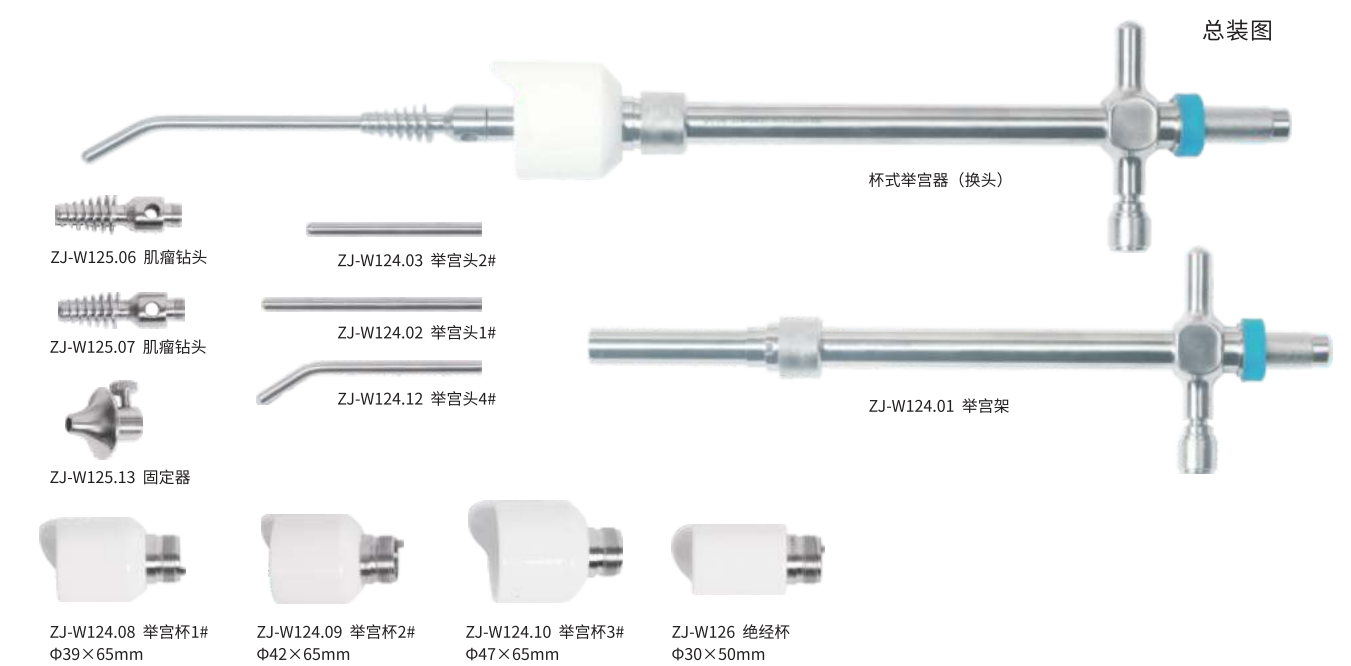

多功能小儿举宫操纵器E型 Multifunctional uterus-lifting work apparatus

总装图

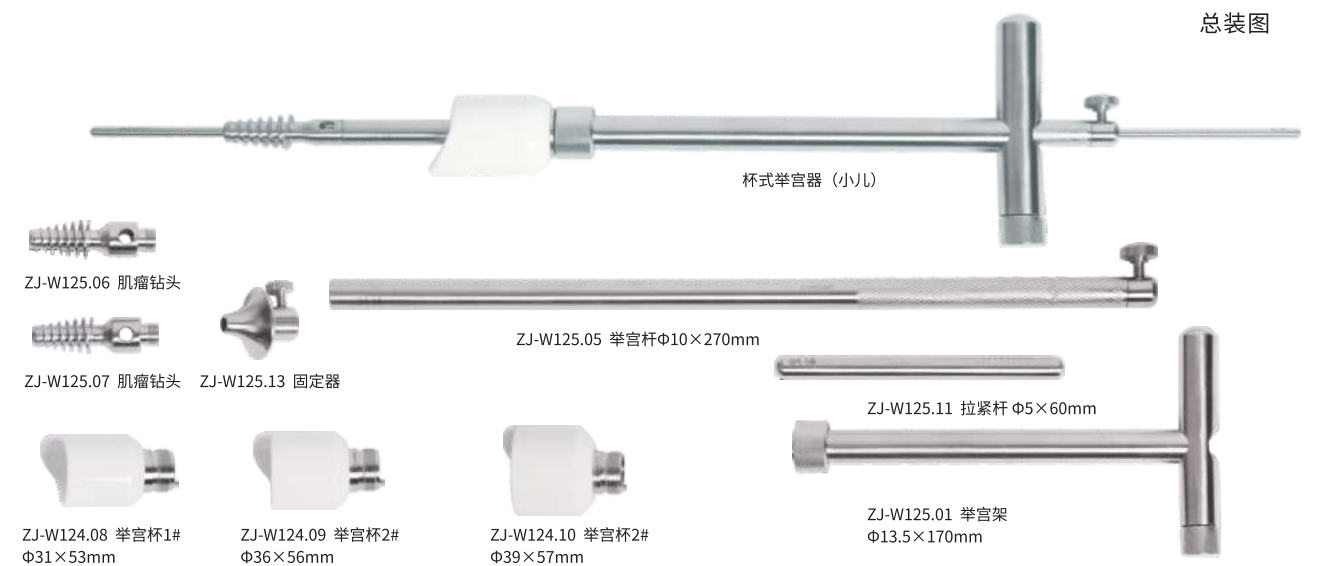

多功能举宫器 (一柄六头) Multifunctional uterus-lifting work apparatus

总装图





内窥镜仿真训练器

ZJM199KL型内镜仿真训练器技术参数

- 1、内镜仿真训练箱尺寸：L43XW33XH38CM
- 2、输入电源：~220/75VA；50/60Hz；
- 3、360度旋转高清医用光学CCD摄像机1套（带电动调焦、放大功能）；附技术参数表
- 4、19寸液晶监视器；(附技术参数表)
- 5、LED光源一套（DC12V）；
- 6、HDMI高清视频输出，
- 7、直流12V电源输出（供监视器）
- 8、高清视频处理器，USB独立存储、回放
- 9、仿真人体外形
- 10、220V输入电源线1根
- 11、HDMI高清线1支
- 12、DC12V双头电源线1支（5.5×2.1接口）
- 13、遥控器1只
- 14、外箱尺寸：L55XW51XH46CM
- 15、持针器1把、弯剪1把、弯分离1把、抓取钳1把
- 16、具备4种模块：
 - 3D缝合模块1个，模拟组织切口、真实触觉反馈；
 - 技巧训练模块3个，梅花桩模块、凌波微步模块、派送服务模块



腹腔镜主机系统

高清摄像机 Camera system



高清摄像机

- 1、*输出分辨率：1920×1080 P@60Hz
- 2、影像传感器：1/3 HD CCD
- 3、*最低照度：0.05Lux @F1.0
- 4、白平衡模式：手动锁定、预设色温、自动
- 5、冻结：手动
- 6、白平衡范围：1800-1050K
- 7、*宽动态技术：ATR-EX数字宽动态技术（自动色调复原）
- 8、信噪比：60dB
- 9、视频输出：BNC、DVI、VGA、HDMI、RGB
- 10、菜单显示：OSD菜单

高亮度冷光源 Cold light source



高亮度冷光源

- 1、电源要求：
 - 电压：~ 220V 50HZ
 - 输入功率不大于：550VA (配用300W氙灯灯泡)
 - 熔断器：F4AL/250V×2
- 2、使用环境条件
 - 温度：5℃~40℃
 - 湿度：≤80%
 - 大气压：760hpa~1060hpa
- 3、色温：6400K+500K 显色指数：Ra≥85
- 4、*照度：照度可调节，最大照度≥1800000Lx
- 5、*灯泡寿命≥800h
- 6、机壳表面升温，最高不超过60℃
- 7、整机工作噪声：≥55db(A)

内窥镜接口 Endoscopy interface

导光束 Light transmitting bundle



连接器配WOLF内窥镜



连接器配WOLF冷光源



连接器配OLYMPUS冷光源



连接器
配STRYKER导光束插头端



连接器
配ACMI导光束插头端



连接器
配ACMI,STRYKER内窥镜



导光束

气腹机 Insufflator



气腹机

- 1、电源要求
电压：~220V、50Hz;
输入功率：50VA;
设备运行方式：连续运行;
熔断器：2×FO.5AL/250V。
- 2、环境要求
温度：10°C~40°C;
湿度：≤80%;
大气压：760hpa-1060hpa。
- 3、气压：设定范围为5mmHg~ 25mmHg; 产品的气压显示值与实际值为±3mmHg。
- 4、气流量：产品工作时，输出的气体实际流速与显示值之间的偏差不大于（气体流量<10L/min时允差±2L/min，气体流量≥10L/min时允差±20%）。
- 5、耗气量：显示值允差±15%。
- 6、供气监测功能：气腹机具有CO₂供气监测功能，当连接CO₂钢瓶通气时，监视指为绿色，未连接时，或供气压力不足时，亮红灯。
- 7、过压报警和释放功能：具有过压报警装置和过压释放功能，当腹腔内的压力高于设定压力5mmHg，持续时间5S钟以上时开始报警并开始泄气减压。
- 8、工作条件下，整机的噪声≤60dB（A）。

医用加压器 Suction Irrigation device



医用加压器

- | | |
|--|---|
| 1、电源要求：
电压：220V 50HZ
输入功率：50VA（配用2000ml废液瓶）
熔断器：2XT 0.5A/250V | 3、正压工作范围20Kpa~60kPa
4、负压工作范围-60kPa~-20Kpa
5、最小冲洗量≥1000ml/min
6、最小吸气量≥1500ml/min
7、整机工作噪声不大于：65db(A)
8、主机外型尺寸360×280×140mm
9、主机重量8kg |
| 2、使用环境条件：
温度：10°C~40°C
湿度：≤80%
大气压：800hpa~1060hpa | |

医用加压器 Suction Irrigation device

医用加压器 Suction Irrigation device



医用加压器（不带膜片）




医用加压器

- | | |
|---|---|
| <p>1、电源要求：
电压：220V 50HZ
输入功率：100VA
熔断器：2XT 0.5A/250V</p> <p>2、使用环境条件：
温度：10°C~40°C
湿度：≤80%
大气压：800hpa~1060hpa</p> | <p>3、正压工作范围20Kpa~60kPa
4、最小冲洗量≥1000ml/min
5、整机工作噪声不大于：65db(A)
6、主机外型尺寸360×280×140mm
7、主机重量8kg</p> |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>1、电源要求：
电压：220V 50HZ
输入功率：100VA
熔断器：2XT 0.5A/250V</p> <p>2、使用环境条件：
温度：10°C~40°C
湿度：≤80%
大气压：800hpa~1060hpa</p> | <p>3、正压工作范围20Kpa~60kPa
4、最小冲洗量≥1000ml/min
5、整机工作噪声不大于：65db(A)
6、主机外型尺寸360×280×140mm
7、主机重量8kg</p> |
|---|---|

医用器械消毒盒 Medical instruments sterilizing boxc

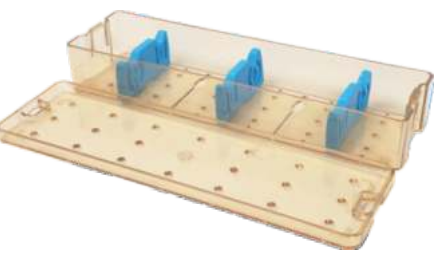

PPSU内窥镜塑料盒
440*70*40mm
270*70*40mm



PPSU器械盒
1、600*300*90
2、600*160*90
3、540*250*90
4、450*200*90
5、300*200*90
6、450*84*42
7、270*85*42



膀胱镜器械消毒盒
500*230*90 可定制



腹腔镜器械消毒盒
550*250*70 550*250*100 可双层



鼻窦镜器械盒
360*260*90mm



支撑喉镜器械消毒盒
415*230*90 可定制



电切镜器械盒
420*280*90 mm



宫腔镜消毒盒
400*140*70mm



经皮肾镜消毒盒
450*200*70



椎间孔镜消毒盒
360*120*60 可定制



不锈钢板冲盒
270*85*45
450*85*45
400*140*70
600*140*80
540*250*100
600*300*100mm



内窥镜不锈钢消毒网篮
270*84*42 370*84*42 450*84*42



电动子宫切割器盒
540*250*135mm




显微牙科整形盒
260*160*25 260*160*35
300*200*50 300*200*70 (可双层) 可定制



硅树脂消毒盒
430*85*45 540*230*90

一次性结扎夹 Disposable ligation clip

注册证号：国械注准20193021053 发明专利号：ZL 2015 1 0381476.9

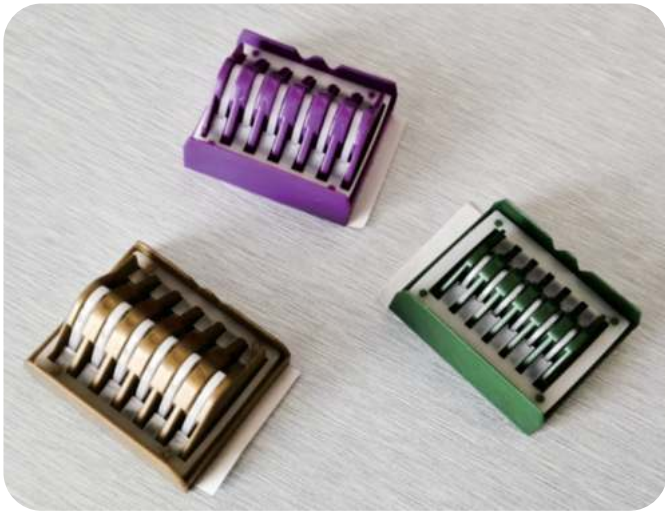

适用于人体外科手术时血管和体腔组织的结扎和关闭 产品有效期限5年

品名	规格型号	臂长1(±1)mm	闭合血管和组织范围直径(mm)	结扎范围(mm)	包装规格
 一次性结扎夹	大号 (L)	17.9	3-10	7-16	2-6枚/组
 一次性结扎夹	中号 (M)	12.9	2-7	5-13	2-6枚/组
 一次性结扎夹	小号 (S)	9.5	1-3	3-10	2-6枚/组

使用规格推荐

INDICATIONS

妇产科

手术名称	规格推荐
卵巢切除术	M
子宫切除术	S,M,L
输卵管切除术	S
盆腔淋巴结清扫术	M,L
巧克力囊肿切除术	S,M

泌尿外科

手术名称	规格推荐
肾切除术	S,M,L
肾上腺切除术	S
膀胱癌根治术	S,M
前列腺癌根治术	S,M

普外科

手术名称	规格推荐
脾切除术	S,M,L
胃切除术	S,M
阑尾切除术	M
肝脏切除术	M,L
胆囊切除术	M
胃空肠吻合术	S,M
结、直肠切除术	M
食管胃底折叠术	S,M
小肠部分切除术	S,M,L
胰、十二指肠切除术	S,M,L

胸外科

手术名称	规格推荐
肺叶切除术	S,M,L
肺大疱切除术	S,M
胸腺瘤切除术	S,M,L
纵隔肿瘤切除术	S,M,L